

INSTRUÇÕES DE USO

AGENTE DE UNIÃO SILANO

Agente de Adesão/Silanização

MARCAS COMERCIAIS:
BIODINÂMICA e ORALTECH

APRESENTAÇÃO:

1 x 2mL, 2,5mL, 3mL, 4mL, 5mL, 6mL, 8mL ou 10mL

Reg. ANVISA: 10298550116

INDICAÇÃO:

Para promover união química em processos de cimentação de peças de porcelana, cerâmica, resina, cerômeros e pinos de fibra de vidro, reparos e colagem de fragmentos.

COMPOSIÇÃO:

Silano e álcool etílico.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

o **AGENTE DE UNIÃO SILANO** atua como conector entre a restauração indireta e o compósito por meio de uma ligação química estável, proporcionando um aumento da resistência de união na interface restauração indireta/compósito.

INSTRUÇÕES DE USO:

PARA CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS COM CIMENTOS RESINOSOS:

1. Realizar o preparo da superfície dentária de acordo com a técnica preconizada pelo agente cimentante;
2. Aplicar o condicionador de porcelana (ácido fluorídrico, p.ex. Ataque F) na superfície interna da restauração pelo tempo recomendado pelo fabricante. Lavar e secar cuidadosamente;
3. Aplicar o AGENTE DE UNIÃO SILANO com o auxílio de um pincel na superfície condicionada, aguardar 1 minuto;
4. Cimentar a restauração de acordo com as recomendações do cimento resinoso a ser utilizado (p.ex. Master Cement Dual).

PARA REPAROS COM RESINA COMPÓSITA:

1. Realizar a profilaxia da superfície a ser reparada com pedra pomes e água, secar e isolar;
2. Remover bordos friáveis e asperizar a superfície com pontas diamantadas;
3. Condicionar a superfície com condicionador de porcelana (ácido fluorídrico, p.ex. Ataque F) pelo tempo recomendado pelo fabricante;
4. Lavar abundantemente e secar completamente;
5. Aplicar o AGENTE DE UNIÃO SILANO com o auxílio de um pincel em toda a superfície condicionada, aguardar 1 minuto;
6. Aplicar o sistema adesivo convencional selecionado (p.ex. Master Bond) e fotoativar conforme instruções do fabricante;
7. Reparar a área fraturada com um compósito (p.ex. Master Fill).

biodinâmica

COLAGEM DE FRAGMENTOS:

1. Realizar a profilaxia com pedra pomes e água da superfície a ser reparada, secar e isolar;
2. Asperizar a superfície a ser reparada e o fragmento com pontas diamantadas;
3. Condicionar a superfície do fragmento e da falha com condicionador de porcelana (ácido fluorídrico, p.ex. Ataque F) pelo tempo recomendado pelo fabricante;
4. Lavar abundantemente e secar completamente;
5. Aplicar o AGENTE DE UNIÃO SILANO com o auxílio de um pincel em toda a superfície condicionada, aguardar 1 minuto;
6. Cimentar o fragmento conforme instruções do fabricante do cimento a ser utilizado;
7. Se houver falta de material no fragmento (cerâmica, porcelana, resina) reconstruir a área fraturada com compósito (p.ex. Master Fill).

CUIDADOS ESPECIAIS:

- Todo procedimento deve ser feito preferencialmente com isolamento absoluto;
- Reparos extensos com compósitos devem ser realizados em camadas para reduzir o efeito da contração de polimerização.
- Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

CONTRAINDICAÇÕES:


Contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes do produto.

ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar produtos além do período indicado de validade.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.

MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA.

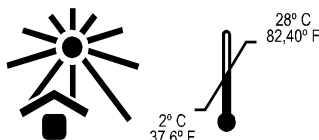

Conservar ao abrigo da luz solar em temperaturas entre 2 a 28°C.

BIODINÂMICA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA

C.N.P.J: 84.833.888/0001-33 - Indústria Brasileira

R. Ronat Walter Sodré, 4350 - Pq. Industrial IV

86200-000 / Ibiporã – PR - Brasil

FONE: +55 43 3178-7000 / FAX: +55 43 3178-7099

www.biodinamica.com.br

Resp. Téc.: Edilson Irineu Sanches Calvo

CRO/PR: 9713

SAC: sac@biodinamica.com.br / +55 43 3178-7000