


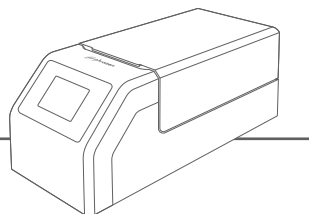

MixHeat

Aquecedor e Misturador de Resina

Guia do Usuário



Componentes

Interruptor de Energia

Entrada de Energia CC

Tampa

Rolos

Tela Touch Screen

Módulo Aquecedor

Sensor de Temperatura

Especificações

Dimensões do Produto L20 x 41,6 x 19,2 cm

Consumo de Energia 24 V = 5 A

Potência Nominal 100 W

Peso 4,5 kg

Temperatura Máxima do Aquecedor 50°C


Tamanho Máximo Compatível do Frasco Resina

9,5 x 22,5 cm

01 Características



Quick Shake

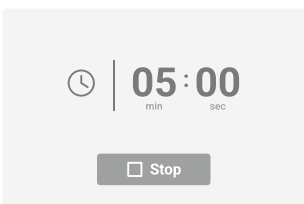

1 Agite Rapidamente

Use este recurso para misturar a resina por 5 minutos sem aquecer



Heat & Shake

Set Time

Max. time : 180 mins.
Min. time : 15 mins.



45 min

Back

Start

2 Aquecer e Agitar

Use esta função para aquecer e misturar a resina por um tempo definido. O aquecedor estará como **ON** por padrão.

- Tempo mínimo de aquecimento: 15 min.
- Tempo máximo de aquecimento: 180 min.
- Intervalo de ajuste: 15 min.
- Temperatura máxima: 50°C



Constant Shake

Constant Shake



3 Agito Constante

Use este recurso para misturar a resina por 6 horas sem aquecer.

⚠️ PRECAUÇÕES

Antes de Usar

Ao usar pela primeira vez, certifique-se de que todas as funções estejam normais.

Mantenha a máquina e seus acessórios longe de crianças e animais.

Certifique-se de que a máquina seja usada em um ambiente bem ventilado, com a parte inferior da ventilação livre.

Mantenha a máquina longe de calor, chamas ou materiais inflamáveis.

Mantenha a máquina longe da água e evite usá-la em ambientes úmidos.

Se o cabo de energia estiver danificado, substitua-o antes de usar a máquina.

Não use plugues ou tomadas com objetos estanhos, umidade ou sujeira para evitar mau contato ou curto-circuitos.

Antes de colocar o frasco de resina, certifique-se de que esteja bem fechado para evitar qualquer vazamento de resina na máquina. **Obs:** Qualquer dano causado por vazamento de resina na máquina não será coberto pela garantia.

Durante o Uso

Em caso de emergência, desligue imediatamente a máquina.

Mantenha sempre a tampa fechada para evitar a entrada de objetos estranhos.

Certifique-se de que a câmara interna esteja livre de objetos estranhos durante o uso para evitar obstruções na operação.

Não toque no módulo de aquecimento para evitar queimaduras.

Não use produtos de limpeza químicos para limpar a tela.

Manuseie a máquina com cuidado, sem usar força.

Não use objetos pontiagudos para bater na tela.

Não enrole os cabos de energia para evitar acúmulo de calor.

Não pise nem aperte os cabos de energia.

Depois do Uso

Desligue a energia antes de tocar no plugue.

Certifique-se de que suas mãos estejam secas ao tocar no plugue ou no interruptor.

Não modifique a máquina por conta própria.

Se a máquina não for utilizada por um longo período, guarde-a adequadamente.

Se forem encontrados defeitos ou mau funcionamento, entre em contato com o nosso suporte. Não tente consertá-lo você mesmo.

É normal notar marcas brancas nos rolos após o uso. Você pode limpá-los com álcool para manter a limpeza da unidade.

*O conjunto de cabos de alimentação incluso na embalagem da unidade principal não pode ser usado com equipamentos elétricos diferentes do dispositivo especificado.



Download Manuais



Instagram



WhatsApp

