

## INSTRUÇÕES DE USO – PEDRA POMES

### DESCRIÇÃO

A Pedra Pomes promove o polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica, deixando as superfícies lisas e sem impregnação de sujidades.

### APRESENTAÇÕES

1 frasco com 100 g.

### INDICAÇÃO DE USO

A Pedra Pomes é utilizada na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica. Pó abrasivo extrafino e de baixa densidade.

### COMPOSIÇÃO

Pedra pomes.

### MODO DE USO

1. Prepare a Pedra Pomes (Maquira), seja pura ou misturada com água, conforme a necessidade.
2. Aplique cuidadosamente a mistura na área desejada utilizando taças de borracha para auxiliar na aplicação.

Lembre-se de fazer movimentos suaves e precisos para assegurar a remoção efetiva das placas e manchas.

### ADVERTÊNCIAS

- Uso exclusivo do cirurgião-dentista.
- Mantenha o material fora do alcance das crianças.
- Este material foi fabricado somente para uso odontológico e deve ser manipulado de acordo com as instruções de uso. O fabricante não é responsável por danos causados por outros usos ou por manipulação incorreta não descrita nesse manual. Além disso, o usuário está obrigado a comprovar, antes do emprego e sob sua responsabilidade, se este material é compatível com a utilização desejada, principalmente quando esta utilização não está indicada na presente indicação de uso.
- Seguir rigorosamente os procedimentos fornecidos nas instruções de uso.
- Não utilize instrumentos contaminados nas manipulações.
- Em caso de reações alérgicas, suspenda o uso imediatamente. Se necessário busque orientação médica.

- Proibido reprocessar. Após a mistura o produto não retorna ao estado inicial.
- Não exponha o material a temperaturas acima de 30 °C.
- Não exponha o material diretamente à luz solar.
- Após o uso deve ser observado o perfeito vedamento dos frascos.
- Evite o contato com os olhos para não danificar a córnea. Em caso de reação com esse tecido, deve-se lavar com água em abundância e procurar assistência médica.
- Evite a ingestão do produto. Em casos acidentais, o paciente deverá ingerir bastante água e, em caso de reações indesejadas, deve-se procurar assistência médica.
- Não utilize o material se a embalagem estiver danificada.

### **PRECAUÇÕES**

- Este produto deve ser utilizado apenas em conformidade com as instruções de uso.
- Deve ser utilizado EPI ao manusear o produto, incluindo luvas e óculos de proteção. Recomenda-se que os pacientes também utilizem óculos de proteção.
- Produto não estéril.

### **CONTRAINDICAÇÃO**

A Pedra Pomes não deve ser utilizada em pessoas alérgicas ao componente da fórmula.

### **EFEITO ADVERSO**

Até o momento não foi identificado nenhum efeito adverso do produto.

### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Armazene o produto em sua embalagem original e em local limpo e seco. Conserve o material vedado adequadamente e sem exposição à luz ou umidade elevada. Deve-se manter o produto a temperatura inferior a 30 °C.

### **CONDIÇÕES DE TRANSPORTE**

O produto pode ser transportado por 15 dias entre -28 °C e 55 °C sem prejuízo da sua integridade.

### **PRAZO DE VALIDADE**

Se armazenado conforme instrução do fabricante, o produto tem validade de 36 meses a partir da data de fabricação.

Após aberto, se armazenado conforme instruções do fabricante, o produto se mantém estável durante todo o seu prazo de validade.

Não usar após a data de validade.

### MODO DE DESCARTE

Descarte o produto de acordo com a legislação local.

Somente para uso profissional.

Recomenda-se ao profissional aplicar as boas práticas clínicas para o descarte de produtos médicos conforme normas sanitárias vigentes.

### DIZERES LEGAIS

**Fabricante | Manufacturer:** Maquira Indústria de Produtos Odontológicos S.A.

**CNPJ:** 05.823.205/0001-90

**Endereço | Dirección | Address:** Av. Melvin Jones, 773 – Parque Industrial Bandeirantes | Maringá – PR | 87070-030 | Brasil

**Responsável Técnico:** Cristiane Furlan | CRF-PR: 14.038

**Notificação ANVISA N°:** 80322400016

**SAP: Atendimento ao cliente | Atención al cliente | Customer service**

0800 726 5848 | sap@maquira.com.br

### SIMBOLOGIA

	Fabricante Manufacturer
	Validade Validez Use-by date
	Código do lote Código del lote Batch code
	Número de catálogo Número del catálogo

	Catalogue number
	Manter seco Mantener seco Keep dry
	Manter afastado da luz solar Mantener lejos de la luz solar Keep away from sunlight
	Limite de temperatura Límite de temperatura Temperature limit
	Não reutilizar No lo reutilice Do not re-use
	Consultar as instruções para utilização Consulte las instrucciones de uso Consult instructions for use
	Não use se a embalagem estiver danificada No utilizar si el embalaje está dañado Do not use if packaging is damaged
	Dispositivo médico Medical device