

Plastalgin

Alginate para impressão de alta precisão.

Presa normal

Aroma de maçã verde

Composição

Cada 100g de pó contém:

Alginate de potássio 14,0 g
Excipientes:..... q.s.p 100,0 g
(Sulfato de cálcio hidratado, pirofosfato de sódio, óxido de magnésio, terra de diatomácea, hexafluorotitanato de potássio, corantes, aromas e polipropilenoglicol)

Propriedades

Plastalgin é um alginate para impressões de alta precisão, de uso odontológico. Suas propriedades são apresentadas a seguir:

Tempo de mistura: 45"
Tempo total de manipulação: 2'15"
Tempo de presa: 3'10"
Viscosidade: 38mm
Reprodução dos detalhes: 20µ
Deformação à compressão: 12,5%

Indicação

Plastalgin é indicado para impressões de alta precisão.
Isento de poeira.

Contraindicação

Hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula.

Modo de uso

Preencher a moldeira com a mistura obtida e levá-la à boca com uma leve pressão, até que endureça. Ao retirar a moldagem, enxaguar com água corrente. Em seguida vaziar o gesso. Na falta desta possibilidade, conservar a impressão em um umidificador, mas nunca submergi-la em água.
Os melhores resultados são obtidos com o uso de água e pó a uma temperatura de 21°C.

Observações

Relação de mistura: respeitar sempre a proporção de uma medida de pó (8g) para uma meia medida de água (20,5g). Para medir o pó, tomar uma colher medida e retirar o excesso de pó com uma espátula, sem comprimir. Misturar o pó e a água durante no máximo 45 segundos.

Conservação

Conservar a uma temperatura inferior a 25°C e em local seco.

Apresentação

454g de pó

Validade: 36 meses após a data de fabricação.
NÃO UTILIZE SE O PRAZO DE VALIDADE ESTIVER VENCIDO.

Uso profissional

Registro ANVISA n°: 10291220092

Responsável Técnica:
Taís C. C. Pereira
CRF-SC: 13884

Importado e Distribuído no Brasil por:

TDV Dental Ltda
CNPJ: 81.591.786/0001-60
Rua XV de Novembro, 9944 – Testo Central
CEP 89107-000 Pomerode – SC – Brasil
SAC: (47) 3395-6115
AFE ANVISA: 1029122

Fabricado por:

Septodont Healthcare India Private Ltda
C-1/2 MIDC Industrial Area, Taloja,
Village – Navade, Taluka – Panvel
District – Raigad 410 208
Maharashtra
India

Distribuído por :

SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés - França