

Pt

Cinta profilática é imprescindível nos trabalhos de profilaxia pois acessa com facilidade a região proximal, onde sua face ativa age eficazmente na remoção de cálculos dentais. As microlâminas circulares, localizadas em torno dos furos em uma das faces da fita, tem como principal característica uma ação contra os cálculos, preservando, porém, a integridade do esmalte e dos materiais restauradores.

Indicação: Cinta Profilática é indicada para uso clínico na remoção de placa bacteriana e tártaro.

Uso: Inserir a cinta no espaço interproximal, observando que a face ativa esteja voltada para a proximal desejada. Segurar a fita pelas extremidades, puxá-la contra o dente e aplicá-la em movimentos longitudinais em forma de vai-e-vem até se obter o efeito desejado. Retirar a fita.

Dimensões: 100mm x 4mm.

Advertências, precauções e restrições: Uso profissional. Uso único. Sua reutilização pode causar contaminação cruzada. Quando

existir comprovada alergia ao seu componente, o produto não deve ser utilizado. O contato da fita com a gengiva pode causar ferimentos ao paciente. É recomendável a proteção da papila. A reutilização pode afetar o desempenho do produto. Qualquer incidente grave relacionado ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou pacientes estão estabelecidos.

Armazenamento: Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.

Composição: Aço inoxidável.

Ref.	Código	Conteúdo
0.3076	0009010001	10 fitas de 100mm x 4mm

Resp. Técn: Gisele K. Gruber
CREA/SC 179557-7



Dispositivo Médico



EC REP Obelis S.A

Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: + (32) 2.732.59.54
E-mail: mail@obelis.net

Manufacturer: TDV Dental Ltda.
CNPJ 81.591.786/0001-60
XV de Novembro, 9944 | CEP 89107-000
Pomerode/SC - Brasil
Reg. ANVISA 10291220068
☎ 55 47 3395-6115 | 0800 047 1020
info@tdv.com.br | www.tdv.com.br

Versão 12 - 06/2021