

Discos de Feltro

Discos de feltro indicados para polimento de compósitos, amálgama, metais, cerâmica e esmalte dental com pasta abrasiva à base de óxido de alumínio ou diamante.

Uso: Instalar o mandril no contra-ângulo. Encaixar o disco na extremidade do mandril. Certifique-se de que o disco está completamente fixado ao mandril. Aplicar a pasta sobre o disco. Utilizar o produto em baixa rotação, exercendo pouca pressão, em movimentos circulares, com toques intermitentes.

Tamanhos: 8mm e 12mm.

Advertências, precauções e restrições: Uso profissional. Uso único. Sua reutilização pode causar contaminação cruzada. Recomenda-se que a utilização do produto seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos soltos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente. Quando existir comprovada alergia ao seu componente, o produto não deve ser utilizado. Não utilizar o produto em rotação superior a 4000 RPM. Use proteção ocular para se proteger contra partículas (dentistas e pacientes). Use uma máscara para evitar a inalação de partículas. Os dispositivos rotativos devem ser manuseados com cuidado e controle para evitar ferimentos no paciente. O contato com tecidos moles (pele, gengiva, mucosa) pode resultar em lesões locais. O uso de técnicas de sucção aplicadas durante o procedimento ajuda a limitar o problema de descarga de partículas durante o uso de instrumentação rotatória. Qualquer incidente grave relacionado ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou pacientes estão estabelecidos.

Composição: Feltro de lã.

Armazenamento: Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz.

Ref.	Código	Conteúdo
0.3044	0001000002	Discos de feltro 8 mm - 12 unid.
0.3043	0001000003	Discos de feltro 12 mm - 12 unid.

Manufacturer: TDV Dental Ltda.

CNPJ 81.591.786/0001-60
 XV de Novembro, 9944 | Pomerode/SC - Brasil
 CEP 89107-000 | Reg. ANVISA 10291220044
 ☎ 55 47 3395-6115 | 0800 047 1020
 ✉ info@tdv.com.br | www.tdv.com.br

Resp. Técn: Gisele K. Gruber
 CREA/SC 179557-7

EC REP Obelis S.A.

Bd. Général Wahis 53
 1030 Brussels, Belgium
 Tel: +(32) 2.732.59.54
 E-mail: mail@obelis.net

