

Eugenol

Material Restaurador Provisório
Uso Profissional

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O Eugenol é um líquido límpido, incolor a amarelo, com aroma de cravo e sabor picante. Apresenta baixa solubilidade em água e é completamente solúvel em clorofórmio, álcool etílico, éter, óleos fixos e ácido acético glacial. Quando em contato prolongado com o ar, torna-se mais viscoso e escuro.

INDICAÇÃO

O Eugenol, juntamente com o óxido de zinco é utilizado como curativo na recuperação da polpa inflamada, em restaurações provisórias, obturação de canais radiculares, como forrador cavitário (proteção complexo dentina-polpa) e cimento cirúrgico.

ORIENTAÇÕES AO CIRURGIÃO-DENTISTA

O Eugenol possui ação antiinflamatória, antisséptica, analgésica, antimicrobiana e cicatrizante. Apresenta biocompatibilidade e propriedades anódinas (calmantes) sobre a polpa.

INSTRUÇÕES DE USO

Cimento de Óxido de Zinco - Eugenol:

Colocar sobre uma placa de vidro, 2 a 3 gotas de Eugenol e acrescentar aos poucos o óxido de zinco, espatulando vigorosamente até obter a consistência desejada. Pode ser utilizada a relação pó/líquido de 3:1 ou 4:1 para obter uma boa resistência.

COMPOSIÇÃO

Eugenol.

CONTRA-INDICAÇÕES

Contra-indicado a pessoas com sensibilidade ao produto. Contra-indicado para gestantes, pois pode provocar contração da musculatura do útero. O uso do Eugenol com restaurações de resina é contra-indicado, pois pode haver interferência na polimerização da resina.

EFEITOS ADVERSOS

O Eugenol pode causar irritação na pele. Em contato com a mucosa, provoca sensação picante e pode chegar a provocar queimaduras superficiais. Caso o cimento cirúrgico a base de eugenol seja usado por semanas, pode ocorrer distúrbios gástricos em pacientes mais sensíveis.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Evitar o contato com pele e olhos, não ingerir. Não utilizar com prazo de validade vencido ou caso a embalagem esteja violada. Manter o produto longe do alcance de crianças. Uso exclusivo do cirurgião dentista. Em caso de contato com os olhos lavar com água em abundância por 15 minutos e procurar orientação médica.

MANUSEIO DO PRODUTO

Recomenda-se o uso de luvas, máscara e óculos de proteção durante o manuseio do produto. Após utilização, manter o frasco fechado.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar em local seco, ao abrigo da luz solar, em temperaturas entre 15°C a 30°C.