



Dispositivo acessório para fixação de distintos sistemas de acabamento e/ou polimento em contra-ângulo. Disponíveis em dois sistemas: mandril de encaixe (Versaplus) e mandril de pressão (Praxis).

Uso: Encaixar a haste do mandril no contra-ângulo. Instalar o dispositivo de acabamento/polimento no mandril.

Conexão com contra-ângulo: O mandril Versaplus é fabricado de acordo com as especificações da ISO 1797:2017.

Advertências, precauções e restrições: Uso profissional. O uso do mandril ou discos/pontas em conjunto com produtos similares é de inteira responsabilidade do usuário. Recomenda-se que a utilização do produto seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos soltos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente. Quando existir comprovada alergia a qualquer um dos seus componentes, o produto não deve ser utilizado. Use proteção ocular para se proteger contra partículas (dentistas e pacientes). A utilização de uma barreira dentária é altamente recomendada para proteger contra a potencial ingestão de materiais dentários ou outros detritos. Os dispositivos rotativos devem ser manuseados com cuidado e controle para evitar ferimentos no paciente. O contato com tecidos moles (pele, gengiva, mucosa) pode resultar em lesões locais. Qualquer incidente grave relacionado ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou pacientes estão estabelecidos.

Limpeza: Realizar a limpeza com o auxílio de água e detergente enzimático 4 enzimas (Amilase, Protease, Lipase e Carbohidrase) e com faixa de pH puro entre 6,5 - 7,5. Preparar a solução diluindo conforme orientações do fabricante. A água deve ser potável. Para maior eficácia, recomenda-se que a temperatura esteja entre 40°C e 55°C. Submergir os produtos e deixar em contato por 5 minutos com a solução. Retirar as peças e enxaguar com água corrente por, no mínimo, 10 segundos. Secar as peças com papel absorvente ou lenços descartáveis.

Esterilização: O mandril deve ser esterilizado em autoclave (126°C, 16 min) após cada paciente.

Limites de Reprocessamento: O processamento repetido tem efeito mínimo no mandril devido à sua composição. Este é um dispositivo de uso múltiplo. O fabricante garante até 50 reutilizações. **Inspecção:** Inspeccione cuidadosamente o mandril para garantir que todos os detritos tenham sido removidos. Observe danos / quebra do produto que impeçam o funcionamento adequado e não utilize nesses casos.

Composição: Metal com revestimento em níquel. **Armazenamento:** Armazenar até 30°C (86°F), em local seco e ao abrigo da luz solar.

Dispositivo accesorio para fijación de distintos sistemas de acabamento y/o pulimento en contraángulo. Disponible en dos sistemas: mandril de encaje (Versaplus) y mandril de presión (Praxis).

Uso: Encajar el vástago del mandril en el contra-ángulo. Instalar el dispositivo de acabado/pulido en el mandril.

Conexión con contra-ángulo: El mandril Versaplus es fabricado de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO 1797:2017.

Advertencias, precauciones y restricciones: Uso profesional. La utilización del mandril o de los discos/puntas con productos similares es de entera responsabilidad del usuario. Se recomienda que el uso del producto sea siempre acompañado de aislamiento absoluto del campo operatorio, una vez que objetos sueltos pueden ser deglutidos o aspirados accidentalmente. En casos de alergia comprobada a cualquier uno de sus componentes, el producto no debe ser utilizado. Use protección para los ojos para proteger contra partículas (dentistas y pacientes). Se recomienda encarecidamente el uso de una barrera dental como protección frente a la posible ingestión de materiales dentales u otros residuos. Manipule con cuidado y control los dispositivos giratorios para evitar lesionar al paciente. El contacto con los tejidos blandos (piel, encías, mucosa) podría dañar dichos tejidos. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

Limpeza: Realice la limpieza con la ayuda de agua y detergente enzimático 4 enzimas (amilasa, proteasa, lipasa y carbohidrasa) y con un rango de pH puro de 6.5 - 7.5. Prepare la solución de dilución de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El agua debe ser potable. Para una mejor efectividad, se recomienda que la temperatura esté entre 40°C y 55°C. Sumergir los productos y dejarlos en contacto con la solución durante 5 minutos. Retire las piezas y enjuague con agua corriente durante al menos 10 segundos. Secar las piezas con papel absorbente o pañuelos desechables. **Esterilización:** El mandril se debe esterilizar en autoclave (126°C, 16 min) después de cada paciente. **Limites de reprocessamiento:** El procesamiento repetido tiene un efecto mínimo en el mandril debido a su composición. Este es un dispositivo reutilizable. El fabricante garantiza hasta 50 reutilizaciones. **Inspección:** inspeccione cuidadosamente el mandril para asegurarse de que se hayan retirado todos los residuos. Observar daños / que impiden el correcto funcionamiento y no utilizarlos en tales casos.

Composición: Metal niquelado. **Almacenamiento:** Almacenar hasta 30°C (86°F), en lugar seco, al abrigo de la luz.

Ref.	Código	Conteúdo / Contenido
0.9912	0010010015	Mandril Versaplus - 1 un.

Manufacturer: TDV Dental Ltda.
 CNPJ 81.591.786/0001-60
 XV de Novembro, 9944 | Pomerode/SC - Brasil
 CEP 89107-000 | Reg. ANVISA 10291220030
 ☎ 55 47 3395-6115 | 0800 047 1020
 info@tdv.com.br | www.tdv.com.br

Resp. Técn: Gisele K. Gruber
 CREA/SC 179557-7

EC REP Obelis S.A
 Bd. Général Wahnis 53
 1030 Brussels, Belgium
 Tel: +(32) 2.732.59.54
 Fax: +(32) 2.732.60.03
 E-mail: mail@obelis.net

Versão/Versión 10-06/2021

