

INSTRUÇÕES DE USO

BlueEvidence

Azul de Metileno

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A AF do Brasil apresenta do Gel Evidenciar de Placa e Fotossensibilizante BlueEvidence 5 (0,005%) e BlueEvidence 10 (0,01%), são géis à base de Azul de Metileno desenvolvidos para evidenciar placa bacteriana, infiltrações e microfraturas em estruturas dentárias. Também atuam como agente fotossensibilizante em procedimentos de Terapia Fotodinâmica (TFD), promovendo descontaminação localizada com segurança e eficácia.

2. APRESENTAÇÃO

- BlueEvidence 5 e BlueEvidence 10

Caixa Kit contendo 10 seringas de 1,0 mL cada, acompanhadas de 10 bicos aplicadores;

Caixa ou Flowpack contendo 03 seringas de 1,0 mL ou 3,0 mL cada, acompanhadas de 03 bicos aplicadores;

Caixa ou Flowpack contendo 01 seringas de 1,0 mL ou 3,0 mL cada, acompanhadas de 1 bicos aplicadores.

3. COMPOSIÇÃO

Azul de Metileno, Água, Carbopol e Hidróxido de sódio.

4. INDICAÇÃO DE USO

Indicado para evidenciar placa bacteriana, infiltrações e trincas em dentes. Também utilizado como fotossensibilizante em TFD em tratamentos periodontais, endodônticos, peri-implantares e lesões mucosas.

5. CONSERVAÇÃO / ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco, fresco, ao abrigo da luz direta. Manter fora do alcance de crianças. Temperatura recomendada: 15°C a 30°C.

6. INSTRUÇÕES PARA USO

1. Verifique a integridade da seringa;
2. Acople o bico aplicador no momento do uso;
3. Aplique o gel diretamente na área desejada;
4. Aguarde 60 segundos, lave o local de aplicação com água e observe se a coloração azul é destacada nas áreas pretendidas;
5. Enxágue com água após o uso, o produto não deve permanecer após a retirada da placa ou correção das infiltrações.

7. CONTRA INDICAÇÕES

Não utilizar em pacientes com hipersensibilidade ao Azul de Metileno. Não injetar. Não utilizar com agentes oxidantes fortes.

8. ADVERTÊNCIAS

Uso exclusivo por cirurgiões-dentistas. Produto não estéril. Manusear com luvas e equipamentos de proteção individual.

9. CUIDADOS ESPECIAIS

Evitar contato com tecidos não alvo. Produto pode manchar roupas ou instrumentos. Descartar seringas usadas conforme regulamentação local.

10. MANIPULAÇÃO

Produto pronto para uso. Não diluir. Utilizar somente o bico aplicador fornecido. Não reutilizar.

11. VALIDADE

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação, respeitando as condições de armazenamento