



Alicate Unimatrix

O Alicate Unimatrix é um instrumento desenvolvido para manusear com precisão e segurança o grampo do sistema Unimatrix e Unimatrix R, e as Cunhas Elásticas.

Uso: Grampos Unimatrix: Posicionar o grampo Unimatrix ou Unimatrix R no mordente do Alicate Unimatrix. Comprimir o alicate até obter a abertura desejada do grampo. Posicionar o grampo na posição desejada e abrir o Alicate Unimatrix lentamente. Retirar o alicate da boca. **Cunhas Elásticas:** Selecionar a cunha adequada ao procedimento e encaixá-la no mordente do alicate. Comprimir o alicate até obter a espessura necessária da cunha. Posicionar a cunha na posição desejada e abrir o Alicate Unimatrix lentamente. Retirar o alicate da boca. Concluído o procedimento, puxar a cunha por uma das extremidades e cortá-la pela parte central, retirando as partes resultantes da boca do paciente.

Advertências, precauções e restrições: Uso profissional. Quando existir comprovada alergia ao seu componente, o produto não deve ser utilizado. A utilização do alicate para outras finalidades é de inteira responsabilidade do usuário. O alicate deve ser esterilizado antes do uso e após cada paciente. Qualquer incidente grave relacionado ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estão estabelecidos.

Limpeza: Realizar a limpeza com o auxílio de água e detergente enzimático 4 enzimas (Amilase, Protease, Lipase e Carbohidrase) e com faixa de pH puro entre 6,5 – 7,5. Preparar a solução conforme orientações do fabricante. A água deve ser potável. Para maior eficácia, recomenda-se que a temperatura esteja entre 40°C e 55°C. Submergir os produtos e deixar em contato com a solução durante 5 minutos. Retirar as peças e enxaguar com água corrente por, no mínimo, 10 segundos. Secar as peças com papel absorvente ou lenços descartáveis. **Esterilização:** Deve ser esterilizado separadamente em autoclave até (126°C - 16min). **Inspeção:** Verifique o produto antes de cada uso. Observe se há danos (quebras / trincas / ferrugem) que impeçam o funcionamento adequado e não utilize nesses casos. Essas condições são indicativas de fragilidade do material, cuja força pode ser reduzida durante o uso clínico.

Armazenamento: Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.

Composição: Aço inoxidável.

Normas aplicadas: Alicate Unimatrix é resistente a corrosão de acordo com a norma ISO 13402.

Versão 05 - 05/2021

Ref.	Código	Conteúdo / Contenido
0.4123	0003020012	1 Alicate Unimatrix / 1 Alicates Unimatrix

Manufacturer

TDV Dental Ltda.
CNPJ 81.591.786/0001-60
XV de Novembro, 9944 | CEP 89107-000
Pomerode/SC - Brasil | Registro ANVISA: 1029122012
☎ 55 47 3395-6115 | 0800 047 1020
info@tdv.com.br | www.tdv.com.br

Responsável Técnica
Gisele Karina Gruber – CREA/SC 179557-7.



Dispositivo Médico

Esterilizável/
Esterilizable

Autoclave
126°C - 16min

Alicates Unimatrix

Alicates Unimatrix es un instrumento desarrollado para manipular con precisión y seguridad el anillo de fijación de los sistemas de matrices seccionales Unimatrix y Unimatrix R, y las Cunhas Elásticas.

Uso: Anillos de fijación Unimatrix: Posicionar el anillo de fijación Unimatrix o Unimatrix R en los extremos de los Alicates Unimatrix. Comprimir los alicates hasta obtener la abertura deseada del anillo. Posicionar el anillo en la posición deseada y aliviar la fuerza de los Alicates Unimatrix lentamente. Retirar los alicates de la boca. **Cunhas Elásticas:** Elegir la cunha deseada e instalárla por sus extremidades laterales en los Alicates. Comprimir los Alicates hasta obtener la apertura y espesor necesarios para introducir la cunha en el espacio proximal. Poner la cunha en la posición deseada y aliviar la fuerza de los Alicates Unimatrix lentamente, desencajando los extremos de la pinza de los orificios de la cunha. Retirar los Alicates de la boca. Finalizado el procedimiento, sacar la cunha por una de las extremidades, cortándola en la parte central, removiendo las sobras de material, de la boca del paciente.

Advertencias, precauciones y restricciones: Uso profesional. En caso de alergia comprobada del paciente a cualquiera de los componentes de este producto, el mismo no deberá ser utilizado. La utilización de los alicates para otras finalidades es de total responsabilidad del usuario. Debe esterilizar los Alicates antes de cada uso y después de realizado el trabajo en cada paciente. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

Limpeza: Realice la limpieza con la ayuda de agua y detergente enzimático 4 enzimas (Amilasa, Proteasa, Lipasa y Carbohidrase) y con un pH puro entre 6,5 y 7,5. Prepare la solución de dilución de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El agua debe ser potable. Para una mejor efectividad, se recomienda que la temperatura esté entre 40°C y 55°C. Sumergir los productos y dejarlos en contacto con la solución durante 5 minutos. Retire las piezas y enjuague con agua corriente durante al menos 10 segundos. Secar las piezas con papel absorbente o pañuelos desechables. **Esterilización:** Debe esterilizarse por separado en autoclave hasta (126°C - 16min). **Inspección:** Verifique el producto antes de cada uso. Observe si existen daños (roturas / grietas / herrumbre) que impidan su correcto funcionamiento y no utilizar en tales casos. Estas condiciones son indicativas de la fragilidad del material, cuya resistencia puede reducirse durante el uso clínico.

Almacenamiento: Almacenar en local seco, fresco y al abrigo de la luz solar.

Composición: Acero inoxidable.

Normas aplicadas: Los Alicates Unimatrix son resistentes a la corrosión de acuerdo con la norma ISO 13402.

Versión 05 - 05/2021