

BIOCLER

DENTES ACRÍLICOS

Indicação:

Dentes de dupla prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, encerramento de diagnóstico e facetas.

Características/Benefícios:

- Modelário latino-americano permite perfeita harmonia facial.
- Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
- Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
- Angulação de 33° nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.
- As cores Trubyte são conhecidas e utilizadas no mercado nacional, além da cor Biotone.
- Alta durabilidade, possui alta resistência mecânica, química e à abrasão.
- Fossa oclusais mais profundas facilitam a trituração dos alimentos.

Modelos:

ANTERIORES SUPERIORES:

2D, 3D, 3M, 2N, 3N, 3P, A23, A25, A26, 263, 264, 266, 2P, 38, 267.

ANTERIORES INFERIORES:

2D, 3D, 3M, 2N, 3N, 3P, A25, A26, A25, 266, 2P.

POSTERIORES SUPERIORES E INFERIORES:

30M, 32M, 30L, 32L, 34L.

CORES: 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77 e 81.

Composição: Polimetacrilato de Metila, Dimetacrilato de Etilenoglicol e Pigmentos Biocompatíveis.

Instruções de Uso:

Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual. Para melhor adesão dos dentes ao polímero da base da prótese, asperizar a região inferior do dente com uma fresa diamantada de granulação média (assim é maximizada a superfície de contato com a resina acrílica e são produzidas microfissuras, formando uma base para umedecer com monômero). É recomendada a asperização na região cervical do dente que estará em contato com a resina acrílica, a fim de se obter uma melhor adesão química e, assim, evitar a infiltração de corantes alimentares.

Recomendações ao paciente: Para aumentar a durabilidade dos dentes, é recomendada uma higienização diária sem uso de substâncias agressivas, como ácidos ou álcalis.

Advertências e precauções:

Conservar ao abrigo de luz e calor.
Somente para uso odontológico.
Utilizar tabela de articulação e escala de cor BIOCLER.

Contraindicações:

Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais.

Validade: 10 anos a partir da data de fabricação.

Cadastro ANVISA: nº 10216040027

Técnico Responsável: Hélio Wiebeck - CRQ IV 04302790



Tabela de Articulação

Anteriores Superiores/Inferiores		Posteriores Superiores/Inferiores
2D	2D	30M-30L
3D	3D	30M-32M
3M	3M	30M
2N	2N	30L
3N	3N	32M-30L
3P	3P	32M-32L
A23	3M	30M
A25	A25	34L-32L
A26	A26	32M-32L
263	2N	30M-30L
264	3N	32M-32L
266	266	34L
2P	2P	34L-32L
38	266	34L
267	266	34L