

ADAPT SUPERCAP E SUPERMAT

Sistema prático de matrizes adaptáveis

Indicação

Utilizado para auxiliar em restauração classe II mesial e distal.



Matrizes descartáveis.

Instrumento regulador que abre e fecha, acoplando adaptadores de matrizes e permitindo a regulação de tamanho, facilitando a colocação no elemento a ser restaurado. Esse sistema possui a vantagem de ser menos invasivo e elimina os problemas de deformação do efeito “alavanca” dos sistemas tradicionais.

Facilidade na colocação da matriz no dente a ser restaurado.

Praticidade: matrizes pré-montadas em aço e poliéster para molares e pré-molares.

Conforto para o paciente, eliminando o efeito “alavanca”.

Higiênico: cabo autoclavável a 134°C por 3 minutos.

Composição básica

- **Adapt SuperCap:** peça em policarbonato em matriz de aço ou tira de poliéster.
- **SuperMat:** cabo de policarbonato grau médico, anel regulador e ponta de metal.

Instruções de uso



Anel regulador

Abra pinça empurrando-o para cima e encaixe a matriz Adapt SuperCap. Feche a pinça puxando-o para baixo.



Centralização

Na vestibular do dente a ser restaurado: gire sentido horário ou anti-horário para posicionar a matriz na mesial, distal, na fase lingual ou palatina.

Apresentação

- Sistema de matrizes SuperMat e Adapt SuperCap - 1 instrumento SuperMat e 20 matrizes sortidas (4 unid. de matriz de aço 0.030/5mm; 3 unid. de matriz de aço 0.038/5mm; 4 unid. de matriz de aço 0.030/6,3mm; 3 unid. matriz de aço 0.038/6,3mm; 3 unid. de matriz transparente 0.05/5mm; 3 unid. de matriz transparente 0.05/6,3mm).
- Reposição matrizes de aço: 20 unidades (5 unid. de cada modelo: 0.030/5mm; 0.030/6,3mm; 0.038/5mm; 0.038/6,3mm).
- Reposição matrizes transparentes: 10 unidades (5 unid. de cada modelo: 0.05/5mm e 0.05/6,3mm).