



# FinalTouch

MATERIAL DE CARACTERIZAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL

**VOCO**  
OS DENTALISTAS

## Olhando ao espelho

Nenhum dente tem uma cor completamente uniforme. Zonas translúcidas, fissuras e colos dentários escurecidos, “white spots”, manchas no esmalte – tudo isso pode fazer parte da aparência dos dentes naturais.

Para parecer natural, uma restauração não tem necessariamente de ter uma cor uniforme e sem manchas. Mais desejável que isto é que as características naturais do dente sejam reproduzidas e acentuadas.

**Por isso, para obter um máximo de naturalidade, às vezes é preciso jogar com mais cores!**



## 5 cores para resultados estéticos naturais

### Áreas de aplicação

#### Branco

- Manchas no esmalte, manchas de calcificação, “white spots”
- Efeitos de halo
- Acentuação de cúspides e cristas
- Encobrimento de estruturas dentárias com alteração de cor

#### Azul

- Zonas de esmalte translúcidas e áreas opalescentes

#### Amarelo, laranja

- Colos dentários escurecidos
- Acentuação do núcleo dentinário
- Realce de fissuras
- Características individuais do esmalte

#### Laranja, castanho

- Sulcos no esmalte, fissuras escurecidas

## Reprodução de fissuras durante o procedimento restaurador

**FinalTouch castanho – aplicado em combinação com o Admira® Fusion**



Preenchimento de uma cavidade de classe I e escultura de uma fina fissura para definir a linha de caracterização



Aplicação do FinalTouch castanho na fissura esculpida



Recobrimento com o material de restauração



Restauração com aparência natural e de elevada estética após o acabamento e o polimento

Fonte: Dr. Maurício Watanabe, Brasil

## Correção estética do dente 12

**FinalTouch branco, azul, laranja – aplicado em combinação com o Amaris®**

Reconstrução do terço vestíbulo-incisal com o sistema Amaris e caracterização com o FinalTouch.

Conformação de características internas (extremidades dos mamelões) e reprodução da hipomineralização com o FinalTouch branco. Caracterização dos lóbulos dentinários centrais com o FinalTouch laranja e definição da opalescência nos ângulos incisais com o FinalTouch azul.



Situação inicial



Resultado final: Estética natural

Fonte: Dr. Clarence Tam, Nova Zelândia

## Correção da linha incisal do sorriso com facetas de estética natural

**FinalTouch branco, castanho – uso em facetas em compósito**



Incisivos centrais demasiado curtos em relação aos incisivos laterais superiores e um pequeno diastema



Individualização da cor das facetas: caracterização dos bordos incisais com FinalTouch branco e das faces vestibulares com FinalTouch castanho



Restaurações bem adaptadas aos incisivos centrais e em perfeita harmonia com os dentes vizinhos



A paciente plenamente satisfeita após a correção da linha do sorriso

## Caracterização para os mais elevados requisitos estéticos

### Indicações

Caracterização individualizada de restaurações em compósito diretas ou indiretas

Cobertura de alterações da cor dentária

Caracterização de facetas CAD / CAM confeccionadas em consultório



### Vantagens

- Para reproduzir características dentárias
- Perfeito em combinação com os materiais de restauração de compósito e de ORMOCER® da VOCO
- Ótimas qualidades de manuseamento, que permitem obter resultados de elevada estética
- Material com estrutura delicada e consistência homogénea, para uma aplicação precisa
- 5 cores com opacidade adaptada à zona de aplicação

## Apresentação

- REF 2321 Set seringa 5 × 1,5 g (branco, azul, amarelo, laranja, castanho), acessórios
- REF 2323 Seringa 1,5 g branco, acessórios
- REF 2324 Seringa 1,5 g azul, acessórios
- REF 2325 Seringa 1,5 g amarelo, acessórios
- REF 2326 Seringa 1,5 g laranja, acessórios
- REF 2327 Seringa 1,5 g castanho, acessórios
- REF 2147 Cânulas de aplicação tipo 45, 100 un.

VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Straße 1-3  
27472 Cuxhaven  
Alemanha

Linha Gratuita:  
00 800 44 444 555  
Fax: +49 (0) 4721-719-140  
info@voco.com · www.voco.com

Encomendas: