

RENNOVA elleva®

Guia de reconstituição

Bioestimulador
de colágeno de
nova geração

- + Ciência
- + Inovação
- + Tecnologia

rennova.me/elleva



1h

Reconstituição
Fácil e Rápida

CE
1023



Composto por um polímero sintético, o **BIOESTIMULADOR DE COLÁGENO** à base de Ácido Poli-L-Láctico (PLLA) Rennova Elleva® é totalmente **BIOCOMPATÍVEL** e **BIOABSORVÍVEL**. A tecnologia desenvolvida oferece mais segurança e praticidade para o profissional.

Composição

Ácido Poli-L-Láctico,
carboximetilcelulose (CMC)
e manitol apirogênico.

Tratamento

Geralmente realizado em 2 a 3
sessões com intervalos entre 30 a
45 dias, dependendo da indicação
de cada paciente.

Informações de Armazenamento¹

Rennova Elleva® na forma de micropartículas liofilizadas (frasco não reconstituído) pode ser armazenado em temperatura de até 20°C.

Após reconstituído com água estéril para injeção, **Rennova Elleva®** pode ser armazenado sob refrigeração entre 2-8°C podendo ser utilizado dentro de 72 horas.

Não congelar.

Não utilizar em caso de embalagem ou frasco aberto ou danificado.





Reconstituição e Preparo¹

- 1** Retire a tampa removível do frasco e limpe a rolha penetrável com antisséptico.
- 2** Fixe uma agulha 18G (recomendado) a uma seringa de uso estéril. Aspirar 16ml de água esterilizada, introduza a agulha na rolha e adicione lentamente no frasco **RennoVA Elleva®**.
- 3** Agite o frasco por 10 minutos. Deixe repousar pelo menos 1 hora para garantir a hidratação completa, obtendo uma suspensão translúcida e uniforme.



Reconstituição e Preparo¹

4

Volte a agitar imediatamente antes do uso. Limpe a rolha penetrável do frasco com antisséptico e use uma agulha 18G para retirar a suspensão. Não armazene o produto na seringa.

5

Antes de aplicar o **Rennova Elleva**®, trocar a agulha 18G para uma agulha de 21G a 26G. A aplicação também pode ser feita com cânula de 22G a 25G.

6

O produto reconstituído é de uso individual, podendo ser utilizado entre 1 e 72 horas após a reconstituição, sob armazenamento em temperatura entre 2-8°C.

7

Descarte qualquer material restante após o uso.

Plano de aplicação

Rennova Elleva® deve ser injetado de acordo com a necessidade de cada paciente:

- APLICAÇÃO DERME PROFUNDA
- APLICAÇÃO SUBCUTÂNEA (SC)
- APLICAÇÃO SUPRAPERIOSTEAL (SP)


Epiderme

Derme

Subcutâneo


Periosteio

Osso

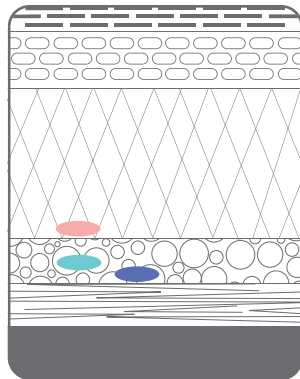

NÃO SUPERFICIALIZAR

Áreas não recomendadas

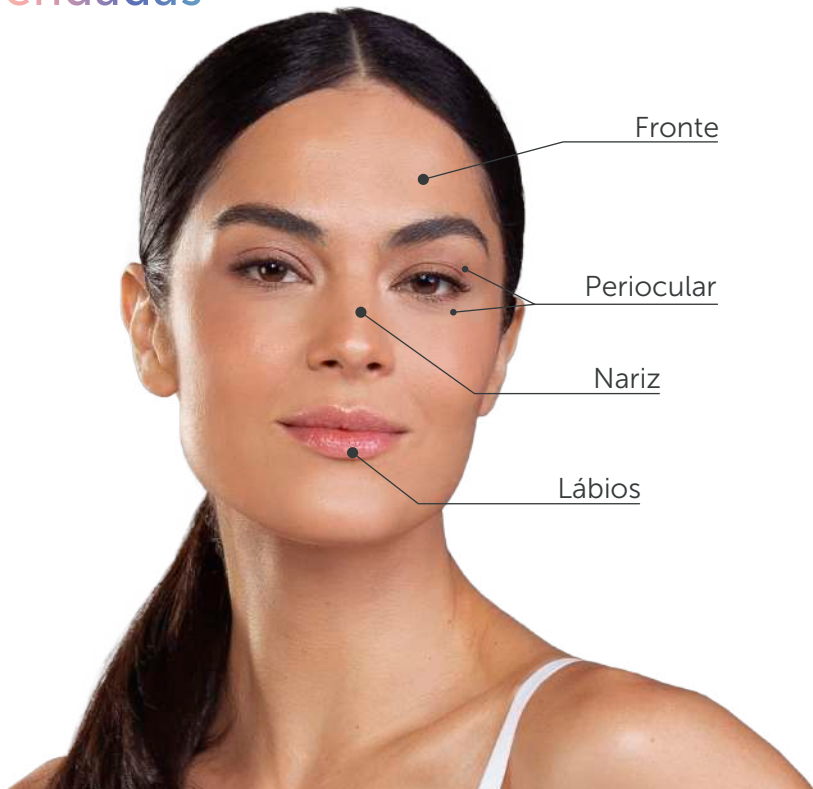



Com o propósito de dar às pessoas o poder de cuidar e potencializar a beleza, a **Rennova®** oferece para ao mercado global os mais avançados produtos para saúde e dermocosméticos.

Aposite a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse agora o site da **Rennova®**



 [rennovaoficial](#)

 [rennovaoficial1](#)

 [rennova.me/elleva](#)

Referência : 1. Instruções de uso do produto.

Registro ANVISA nº 80451960236 - RENNOVA ELLEVA®