



# CleanJoy

PASTA FLUORETADA PARA PROFILAXIA E POLIMENTO  
EM TRÊS GRAUS DE INTENSIDADE DE LIMPEZA

# CleanJoy

## EFICÁCIA E SUAVIDADE

### Limpeza eficaz com suavidade

A prevenção da cárie, da periodontite e da peri-implantite baseia-se não apenas numa correta higiene oral diária, como também numa limpeza dentária profissional realizada com intervalos regulares. Com a finalidade de simplificar o mais possível o procedimento profilático e torná-lo mais cómodo para o paciente, a VOCO criou CleanJoy, um novo sistema de pastas para profilaxia e limpeza dentária profissional. As pastas possuem um agradável sabor de menta. O sistema permite remover de forma eficaz e, ao mesmo tempo, suave os depósitos de placa moles ou mineralizados das superfícies de dentes, restaurações, implantes ou restaurações protéticas. A pasta “fina” é minimamente abrasiva e indica-se também para o polimento após a aplicação de jato de profilaxia. A finalização do procedimento com CleanJoy proporciona superfícies nitidamente lisas, dificultando a adesão de bactérias formadoras de placa e evitando pigmentações. Tais condições são perfeitas para a manutenção da saúde bucal por longos períodos.

### Manuseamento e consistência

CleanJoy distingue-se pela sua boa consistência e homogeneidade. A consistência da pasta é macia e firme ao mesmo tempo, o que permite uma dosagem exata e evita salpicos durante a aplicação da pasta quer com taças, quer com escovas rotativas. A consistência homogénea e firme garante um bom molhamento e evita que a pasta esorra das superfícies a serem tratadas. A remoção da pasta com a aplicação de jato de água também é muito fácil.

### O sistema de cores do semáforo – três tamanhos de grão para resultados perfeitos

CleanJoy é um sistema de profilaxia com três pastas elaboradas em conjunto, que convencem pela ação eficaz e ao mesmo tempo suave de cada uma. Dependendo da quantidade de placa depositada e do grau de pigmentação, pode-se utilizar a pasta “grossa”, “média” ou “fina”. Para o polimento final, porém, indica-se sempre a pasta “fina”. O grau de abrasividade é identificado por um sistema de cores análogo ao do semáforo:

**Pasta vermelha (grossa – valor RDA\* = 195):** Para a remoção eficaz de pigmentações e depósitos de placa bacteriana fortemente acumulados e aderidos.

**Pasta amarela (média – valor RDA\* = 127):** Para a remoção de depósitos de placa bacteriana leve ou moderadamente acumulados.

**Pasta verde (fina – valor RDA\* = 16):** Para a remoção de depósitos de placa bacteriana levemente acumulados, sendo também adequada para a limpeza de implantes. Esta pasta deve ser utilizada para o polimento final após a utilização da pasta vermelha e/ou amarela. Para além disso, também pode ser utilizada após a aplicação de jato de profilaxia.

### Superfícies lisas, fluoreto e xilitol – condições ideais até a próxima profilaxia

Todas as pastas de profilaxia CleanJoy contêm flúor (700 ppm) e xilitol. O flúor ajuda no fortalecimento dos tecidos dentários e promove a sua remineralização. O xilitol tem uma ação bacteriostática comprovada. As superfícies lisas, juntamente com a acção do xilitol, dificultam a acumulação e colonização de bactérias formadoras de placa.

\* Valor RDA em conformidade com a DIN EN ISO 11609

## PROFILAXIA INDIVIDUALIZADA

## Caso 1



Pigmentação extrínseca leve nos dentes anteriores inferiores



Utilização da pasta de profilaxia amarela



Finalização com a pasta de polimento verde



Superfícies limpas e lisas

## Caso 2



Forte pigmentação extrínseca dos dentes anteriores inferiores



Profilaxia das superfícies dentárias com a pasta vermelha



Finalização com a pasta de polimento verde



Superfícies limpas e lisas

Fonte: Dr. Sanzio Marques, Passos, Brasil



Foto: Bonn Medien

Andrea Beyer, assistente dentária especializada em profilaxia e ortodontia, Münchhausen (Alemanha): *“Cada vez mais os pacientes têm vindo a solicitar uma limpeza dentária profissional. Por isso, a nossa equipa estava à procura de uma pasta de profilaxia capaz de remover depósitos de placa difíceis de eliminar, sem lesar a superfície dental. Além disso, pensando nos nossos jovens pacientes, queríamos uma pasta de profilaxia que pudesse ser utilizada sem restrições em crianças e em pacientes com aparelhos ortodônticos fixos. Uma pasta capaz de limpar os dentes sem deixar uma sensação de aspereza e que não danificasse os brackets.*

*Então encontramos CleanJoy, uma pasta divertida e cómoda de aplicar que, graças às “cores de semáforo”, permite um tratamento individualizado consoante o grau de pigmentação dentária de cada paciente. Começando o trabalho com a pasta vermelha (para pigmentações mais fortes), prosseguindo com a pasta amarela e terminando com a pasta verde (para pigmentações mais leves), obtêm-se superfícies completamente lisas e agradáveis para o paciente. Os melhores resultados foram obtidos quando aplicámos CleanJoy com o auxílio de taças de silicone rotativas.”*

# CleanJoy

## SIMPLESMENTE PRÁTICA

### Indicações

Remoção de placa bacteriana superficial mineralizada ou não mineralizada

Remoção de pigmentações extrínsecas (causadas, p. ex., por café, chá ou tabaco)

Polimento das superfícies dentárias na limpeza dentária profissional, antes de branqueamentos ou após a remoção de aparelhos ortodônticos

Limpeza e polimento de restaurações na limpeza dentária profissional

Remoção de restos de material de cimentação provisória antes da cimentação definitiva



### Vantagens

- Consistência firme e homogênea
- Não causa salpicos (2.000 - 3.000 rpm)
- Disponível em três graus de abrasividade, para uma profilaxia individualizada consoante o caso
- Codificação com as cores do semáforo: simples e inconfundível
- Aplicação com qualquer instrumento convencional (escovas, taças etc.)
- Contém flúor (700 ppm)
- Contém xilitol (inibidor do metabolismo bacteriano)
- A pasta de polimento verde tem um baixo grau de abrasividade, por isso é indicada também para a limpeza de implantes

### Apresentação

- |          |                   |
|----------|-------------------|
| REF 2092 | Tubo 100 g grossa |
| REF 2091 | Tubo 100 g média  |
| REF 2090 | Tubo 100 g fina   |

VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Straße 1-3  
27472 Cuxhaven  
Alemanha  
  
Tel.: +49 (0) 4721-719-0  
Fax: +49 (0) 4721-719-140  
  
info@voco.com  
www.voco.pt

Encomendas: