



RennoVA®

Bioestimulador
Ácido Poli-L-Láctico

elleva

O tempo a
seu favor

Orientações pós
procedimento

Material exclusivo para pacientes RennoVA® Elleva



RENNOVA®

Bioestimulador
Ácido Poli-L-Láctico

elleva

For Face
For Body
For Life

Parabéns!

Você acaba de fazer um procedimento que coloca o tempo a seu favor.

Rennova® Elleva é a nova geração de **BIOESTIMULADOR** que promove a formação de colágeno, proporcionando um rejuvenescimento com naturalidade e durabilidade.

Neste guia de orientação pós aplicação do bioestimulador **Rennova® Elleva** você tem todas as informações para a realização das massagens, extremamente importante para você atingir o melhor resultado. Siga, rigorosamente, todas as indicações. Em caso de dúvida consulte o seu profissional de saúde.

Orientações pós procedimento

- 1 Para alcançar melhores resultados, é recomendado a realização das massagens.¹



Durante **cinco dias** após a aplicação faça massagens nas regiões aplicadas no mínimo **cinco vezes** ao dia, por **cinco minutos**.





2

Em casos de eventual aparecimento de hematoma ou inchaço recomenda-se o uso de compressas geladas sobre a área tratada de acordo com orientações do seu profissional da saúde.¹

3

Evite se expor à luz solar nos primeiros dias após aplicação. Recomenda-se utilização de filtro solar.¹

4

Comunique imediatamente ao seu profissional da saúde qualquer sintoma com evolução diferente ou de maior duração.¹

5

Não tome qualquer medicamento sem consultar previamente seu profissional da saúde.¹

Sempre siga as orientações do seu profissional da saúde.



Sua próxima sessão de **Rennova® Elleva**:

Data	Hora	Procedimento

RENNOVA[®]

COMPLETA

Com o propósito de dar às pessoas o poder para cuidar e potencializar a beleza, a **Rennova[®]** oferece para o mercado global os mais avançados produtos injetáveis de estética e dermocosméticos.

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse agora o site da **Rennova[®]**



 [Rennovaoficial](#)

 [rennovaoficial1](#)

 [rennova.me/elleva](#)

Referência : 1. Instruções de uso do produto.