

# Kerr

JUNTOS, SOMOS MAIS

A Kerr Corporation é uma fabricante de consumíveis dentais de primeira linha, presente em todo o mundo. Desde 1891, desenvolvemos e fabricamos produtos que são utilizados em todos os procedimentos odontológicos. Promovemos e preocupamo-nos em oferecer a você soluções inovadoras, por meio de educação e soluções sustentáveis para o clínico,

tornamo-nos sinônimo de integridade, qualidade e confiança para os profissionais de Odontologia em todo o mundo. No Brasil, a marca Kerr é constituída pelas linhas de produtos Kerr Restoratives e Kerr Endodontics. Experimente nossas soluções internacionais. Temos certeza que você vai gostar.

## KAVO Kerr

ANTES UM GRUPO, AGORA UMA ÚNICA CORPORAÇÃO

Oficialmente, somos Kavo Kerr em todos os países do mundo. Unimos nossas forças para inspirar e ser inspirados, oferecendo um portfólio de Odontologia completo para os nossos clientes, melhorando o suporte local e garantindo a simplicidade de vendas, serviços e processos. Parte fundamental da estratégia organizacional, a união

garante o crescimento sustentável e a consolidação de uma empresa líder inovadora em tecnologias dentárias. Nós vamos além de antecipar as suas necessidades: oferecemos produtos cada vez mais inteligentes e eficazes – reflexo da paixão pelo que fazemos todos os dias. Queremos que vocês vivam a melhor experiência junto conosco.

[kerrdental.com.br](http://kerrdental.com.br) | [kavo.com.br](http://kavo.com.br)

**Fábrica KaVo do Brasil Ind. Com. Ltda e Centro de Distribuição Kerr**

Rua Chapecó 86, Saguçu - CEP 89221-040 Joinville/SC - Fone: (47) 3451 0100

**Filial KaVo no Brasil - São Paulo**

Rua Alameda dos Aicás 527, Moema - CEP 04086-001 São Paulo/SP - Fone: (11) 3323 0500

**Presente onde você estiver**

Para assistência técnica acesse o site:

[kavokerr.com.br/centrodereparos](http://kavokerr.com.br/centrodereparos)

Para ouvidoria: [falecom@kavo.com](mailto:falecom@kavo.com)

(47) 3451 0100 (opção 1, 2, 1)

 [linkedin.com/company/kavo-kerr-la](https://www.linkedin.com/company/kavo-kerr-la)

 [facebook.com/kavokerrla](https://www.facebook.com/kavokerrla)

 [instagram.com/kavokerrbr](https://www.instagram.com/kavokerrbr)

 [youtube.com/user/kavodobrasil](https://www.youtube.com/user/kavodobrasil)

**Kerr**  
RESTORATIVES

**Kerr**  
ENDODONTICS

Imagens meramente ilustrativas. As informações constantes neste catálogo podem sofrer alterações sem prévio aviso. Alguns itens mostrados ou mencionados são opcionais ou acessórios. Consulte seu revendedor. Versão 01 - Maio, 2019

SonicFill™ 2

Sistema restaurador para dentes posteriores.

**Kerr**  
RESTORATIVES



## SonicFill™ 2

Um procedimento aprovado agora ainda melhor.

# Restaurações Posteriores

O Sistema SonicFill permite realizar restaurações posteriores em um único passo, por meio da ativação sônica de uma resina especialmente projetada e distribuída pela Kerr, a resina SonicFill 2. É de fácil utilização, que combina as vantagens de uma resina nanohíbrida de alta fluidez às de uma resina universal.

SonicFill torna algo que é entediante, repetitivo, sujeito a erros e estressante em algo fácil, divertido, sem deixar de entregar um resultado de alta qualidade.

É por isso que mais de 15.000 dentistas deixaram para trás a técnica incremental e foram adiante com um incremento único confiável: preenchendo cavidades de até 5mm de profundidade em um incremento único, com um único material - sem nivelamento ou resina de cobertura.



## SonicFill™ 2

SonicFill 2 é cuidadosamente desenvolvido para reter importantes características que permitem um procedimento bulk fill confiável, enquanto adiciona melhorias chave em polimento, estética de maneira geral, resistência ao desgaste e tempo de trabalho.

### ADAPTAÇÃO

Modificadores reológicos especiais na resina SonicFill 2 traz uma alteração brusca mediante a energia sônica aplicada através da peça de mão durante o preenchimento. Isso reduz a viscosidade do material em até 84%, criando uma adaptação similar à de uma resina fluida.



### PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO

SonicFill 2 utiliza uma combinação de índice de refração e um mecanismo de polimerização mais eficiente, permitindo uma profundidade de até 5mm, enquanto ainda retém a opacidade necessária para produzir bons resultados estéticos.






### INTEGRIDADE MARGINAL E ESTRESSE DE CONTRAÇÃO

SonicFill 2 tem o menor estresse de contração entre as resinas bulk fill ou tradicionais, para ajudar a assegurar integridade marginal e reduzir sensibilidade pós-operatória.



## PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTÉTICAS

Aplicar resina em massa não deveria significar ter que abrir mão da performance que você espera de uma resina composta. SonicFill utiliza um novo sistema de partículas de escala nano de óxido de zircônio, que proporciona excelente força, polimento, resistência ao desgaste e outras importantes propriedades mecânicas para assegurar que as restaurações sejam naturais e duráveis - algo que você e seu paciente irão apreciar.

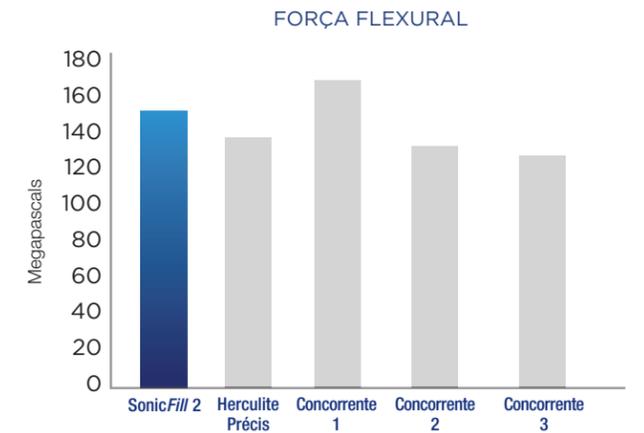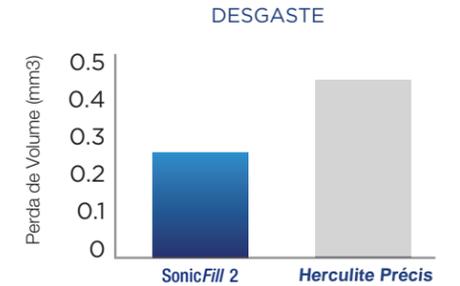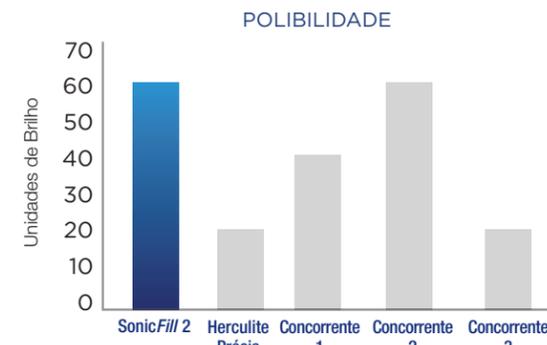

## OUTRAS CARACTERÍSTICAS

- Menor sensibilidade à luz ambiente proporcionando 35% mais tempo de trabalho que a versão original da resina SonicFill.
- Boa radiopacidade para ser facilmente distinguida de estrutura dentária nas radiografias.
- 4 opções de cores: A1, A2, A3 e B1, com excelente efeito camaleão proporcionado pela partícula patenteada pela Kerr de 0,4 microns - para corresponder virtualmente a qualquer cor de dente posterior.



Imagem cedidas pelo Dr. Ron Jackson.



Imagem cedidas pelo Dr. Ron Jackson.

