

Materiais Endodônticos

Cones de Guta Percha

Modelos comerciais:

MF; F; FM; MX; M; ML; MLX; FR(EL); MX(EL); M(EL); ML(EL); L; XL; BFF; BFL; R7; R8; RSP; RSM; RSG; MF 120; F 120; FM 120; M 120; 15/40; 45/80; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 70 e 80

Regra de classificação: 6

Classe de enquadramento: Classe II

Registro: 80218760004

Composição:

- Guta percha purificada, óxido de zinco P.A. e corante orgânico.

Especificações técnicas:

- Rolados a mão com placas de alta precisão de formato e comprimento:
 - (1) Cones - 28 mm (padrão) e 35 mm (extra longo).
 - (2) Bastões - 18 mm (curto) e 23 mm (longo).
 - (3) Acessórios - 28 mm (R7 e R8) e 15 mm (P); 20 mm (M); 25 mm (G) (RS).
- Produto não estéril.
- Produto termolábil (sensível ao calor).
- Fabricante recomenda uso único.
- Prazo de validade: 2 anos.

Indicações de uso:

- Os cones de gutta percha auxiliam no tratamento dentário, sendo específicos para o tratamento de canais radiculares.

Mecanismo de ação:

- Manual (usabilidade), sendo empregados durante o tratamento dos canais radiculares.

Princípio de funcionamento:

- **Cones de gutta percha** = preenchimento do sistema de canais radiculares.
- **Bastões de gutta percha** = apresentam estruturas mais rígidas, para o preenchimento do sistema de canais radiculares (canais mais largos).
- **Acessórios** = apresenta estruturas mais finas, para o complemento do preenchimento do sistema de canais radiculares.

Precauções:

- O produto deve ser esterilizado antes do uso.
- Não utilize esterilização por calor.
- Nunca armazene os produtos em caixas cirúrgicas manchadas ou com riscos acentuados, visto que podem ser focos de contaminação.

Advertências:

- Os produtos de gutta percha devem ser manuseados por profissionais qualificados.
- Os produtos de gutta percha devem ser esterilizados antes do uso.
- Não esterilizar em autoclave ou em estufa (produtos termolábeis).
- Os produtos de gutta percha devem vir isentos de manchas, sujeiras ou substâncias estranhas.
- A rotulagem presente nas caixas, devem ser isentas de manchas, sujeiras ou substâncias estranhas, sem borrões ou falhas na impressão.

Condições de manipulação:

- Os produtos (cones, bastões e acessórios) devem ser inspecionados e esterilizados antes do uso.

Método de esterilização indicado:

- Esterilizar a frio (esterilização química) com agentes químicos:
 - (1) Clorexidina a 2%; ou
 - (2) Hipoclorito de sódio a 1%.
- Os produtos devem ser expostos às soluções por um 1 minuto.

Condições de armazenamento:

- Conservar ao abrigo luz e umidade entre 15 °C e 35 °C.

Condições para o transporte:

- Deve ser transportado sem gerar atritos com outros materiais, a temperatura ambiente, ao abrigo luz, umidade e poeiras.

Formas de apresentação comercial:

- Caixas de base branca em PEAD - polietileno de alta densidade e tampa de cristal transparente. Dimensão 10 cm comprimento x 3,0 cm largura x 2 cm altura;
 - (1) Caixas com cone padrão: 100 un.
 - (2) Caixas com cone extra longo ou bastão: 80 un.
 - (3) Acessórios (RS, R7 e R8): 120 un.

Normas técnicas e Regulamentações específicas:

- Resolução RDC nº 16, de 28 de março de 2013
- Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001



**Esterilizar
a frio antes
do uso**