

PROVJET

DEFINIÇÃO

Coroas ocas de policarbonato provisórias universais indicadas para confecção de coroas provisórias.

USO PRETENDIDO DO PRODUTO

Confecção de coroas provisórias dentais pela técnica de reembasamento direto na boca.

INDICAÇÕES

Para confecção de coroas provisórias.

COMPOSIÇÃO

Policarbonato.

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

Utilizar óculos de proteção em procedimentos de desgaste e polimento do produto.

Por favor, leia e siga estas instruções com atenção para que o produto seja usado corretamente.

TÉCNICA DE USO

1. Reembasar PROVJET com resina acrílica sobre o núcleo previamente cimentado.
2. Ajuste conforme figuras para individualização do PROVJET.
3. Acabamento, polimento e cimentação temporária.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e arejado.