



INSTRUÇÕES DE USO

BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Barreira Gengival AF do BRASIL é uma resina Fotopolimerizável, não traz irritação aos tecidos gengivais do paciente. Possui viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis. Excelente poder de vedação. Aderência mínima e perfeita sobre a gengiva. Não solta da gengiva a menos que forçada. Sai por inteiro no momento de retirá-la. Rendimento até 5 aplicações de arcada completa.

2. APRESENTAÇÃO

Em seringa de polipropileno preta contendo 2g, 2,5g, 3g, 4g ou 5g. Em embalagens unitárias ou contendo 2 unid; 3 unid; 5 unid; ou 10 unid.

3. COMPOSIÇÃO

Monômeros de Uretama Dimetacrilato, Monômeros Metacrilato, Sílica, Carga inerte, Pigmentos, corantes e fotoiniciadores.

4. INDICAÇÃO DE USO

Indicado como substituto do lençol de borracha para a proteção do tecido gengival e nos casos de risco de irritação por contato com produtos utilizados no procedimento clínico, como, por exemplo, clareamento dental e como coadjuvante no isolamento absoluto para melhor vedação de um preparo cavitário ou tratamento endodôntico.

5. AÇÃO DO PRODUTO

O objetivo principal do produto é proteger os tecidos moles do contato com o peróxido de hidrogênio (gel clareador).

6. CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO

- Manter o produto em sua embalagem sempre fechada;
- Proteger da incidência da luz solar direta;



ARMAZENAREM LOCAL SECO A TEMPERATURA AMBIENTE(15 A 30°C).

7. INSTRUÇÕES PARA USO

- Seque a gengiva e os dentes correspondentes à região que se quer proteger;
- Aplique uma fina camada do produto (1-1,5 mm de espessura) sobre a gengiva e papilas gengivais de tal forma que se obtenha total cobertura e um bom campo de proteção para o procedimento que se deseja aplicar;
- Polimerize a resina utilizando 20 a 30 segundos de luz de um fotopolimerizador. Recomenda-se proceder a polimerização logo após a aplicação da resina para prevenir qualquer eventual irritação;
- Verifique se o produto cobre toda a superfície da gengiva e se está completamente polimerizado. Para observar a parte posterior de papilas e gengiva utilize um espelho clínico olhando de incisais para cervical. Evite testá-la forçando ou tentando erguê-la porque isto pode ocasionar infiltração da substância irritante;
- Para remoção do produto basta destaca-la para frente. Esta deve se soltar facilmente por inteiro ou em pedaços grandes.

8. CONTRA INDICAÇÕES

O produto tem monômeros de metacrilato que podem causar reações alérgicas ou irritações leves a pacientes sensíveis a estas substâncias. Suspender o uso do produto em caso de reações alérgicas

9. ADVERTÊNCIAS

A incompleta polimerização do produto ou o tempo excessivo podem levar a uma leve irritação gengival em alguns casos. Efeitos Colaterais

10. CUIDADOS ESPECIAIS

Evite aplicar o produto na gengiva do paciente que tenha passado recentemente por algum tipo de procedimento cirúrgico bucal ou que tenha qualquer tipo de irritação gengival.

11. MANIPULAÇÃO

Ambiente asséptico.

12. INTERAÇÕES

Não há.