

CLEANFORM® é um antisséptico para preparo de cavidades. O Digluconato de Clorexidine é um agente antibacteriano de largo espectro, com atividade sobre microorganismos gram positivos e gram negativos aeróbios e anaeróbios. A limpeza de preparos com Digluconato de Clorexidine à 2% previne contra a presença de bactérias nos canalículos dentinários, responsáveis pela sensibilidade e pela pulpíte. Por sua ação antibacteriana prolongada sobre a placa dental, este produto é indicado na prevenção terapêutica das infecções da cavidade bucal. Cleanform® não contém tensoativos que possam interferir com as forças de retenção dos materiais restauradores. Cleanform® é indicado como bactericida, na limpeza e desinfecção de preparos cavitários, antes da cimentação temporária ou permanente de coroas, inlays, etc., na irrigação de bolsas periodontais, em implantes, para conferir ação antisséptica aos cimentos cirúrgicos, na redução da atividade cariogênica em pacientes com deficiência ou limitações físicas ou mentais e em pacientes geriátricos com numerosas e/ou extensas exposições de raiz. Por sua eficiência como bactericida, o Digluconato de Clorexidine à 2% também tem sido preconizado como curativo intracanal em procedimentos endodônticos. Cleanform® Solução é indicado na limpeza e desinfecção de preparos cavitários e na irrigação de bolsas periodontais e canais radiculares.

Instruções de uso: Umedecer uma bolinha de algodão e aplicar nas cavidades dentinárias. Para irrigação de cavidades dentinárias utilizar o tubete.

Composição: Digluconato de Clorexidine e Água deionizada.

Armazenamento e Conservação: Manter o produto em local fresco e seco, longe da umidade, calor e luz solar direta. Não requer cuidados especiais para transporte.

Advertências e Precauções: O uso prolongado pode causar manchas nas estruturas orais. O Digluconato de Clorexidine à 2% é extremamente amargo e pode causar perda temporária do paladar: restringir o seu uso às áreas necessárias e não utilize para bochechos. Este produto, em todas as suas formas e apresentações, não deve ser utilizado em pacientes com sensibilidade à Clorexidine. O Digluconato de Clorexidine reage com o Hipoclorito de Sódio formando um complexo de cor alaranjada, inativando assim os dois produtos. Desta forma, estas duas soluções nunca devem ser utilizadas em conjunto, uma depois da outra.



LOTE:



USO PROFISSIONAL
USO PROFISSIONAL