

clorhexidina 2% Gel

Indicação: Villevie Clorhexidina é indicada para assepsia de preparos cavitários antes de procedimentos restauradores, procedimentos adesivos para restaurações diretas ou indiretas e antes de cimentação temporária ou permanente de coroas, inlays, onlays e outros.

A limpeza e desinfecção dos preparos cavitários com Villevie Clorhexidina ajuda na prevenção da entrada de bactérias gram-positivas e gram-negativas nos túbulos dentinários, podendo minimizar a sensibilidade pós-operatória e contribuir na prevenção de pulpites. Clorhexidina gel não interfere na adesão de restaurações.

Modo de usar: 1. Aplicar Villevie Clorhexidina no interior do preparo cavitário com auxílio da ponteira aplicadora.
2. Remover o excesso do produto com algodão.

3. A secagem com leve jato de ar após a aplicação e a utilização de água como enxague é opcional, pois está relacionada ao procedimento que será realizado após o preparo cavitário.

Precauções, Contra-Indicações:

Não ingerir o produto. Não usar o produto em pacientes com qualquer sensibilidade à Clorhexidina. Aplique o produto somente na área desejada. Evite o contato com a mucosa bucal e com a língua, pois pode causar perda temporária de paladar. Não usar o produto como enxaguatório bucal.

Armazenamento:

Manter em lugar seco e fresco, protegido da luz solar direta.

Composição: Digluconato de clorhexidina (2%), espessante, conservante e água purificada.



Fabricado por:

DENTALVILLE DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.101.363/0001-86

Rua Advogado Miguel Cercal, 645

Nova Brasília - Joinville - SC - 89214-610

Resp. Técnico: Aldo Castellani

CRQ-SC 13.400.397 13ª R

Reg. ANVISA: 10344110010

Fone/Fax: (47) 3454-2200

contato@villevie.com-www.villevie.com

