

Apresentação

- 15130030000 - 05 Seringas de Selante Fluroshield Matizado com 2g cada e 20 pontas aplicadoras
- 15130040000 - 05 Seringas de Selante Fluroshield Branco Opaco com 2g cada e 20 pontas aplicadoras
- 15130050000 - 01 Seringa de Selante Fluroshield Branco Opaco com 2g cada e 03 pontas aplicadoras
- 15130060000 - 01 Seringa de Selante Fluroshield Matizado com 2g cada e 03 pontas aplicadoras
- 15130070000 - 04 Seringas de Selante Fluroshield Branco com 2g cada e 12 pontas aplicadoras
- 15130080000 - 04 Seringas de Selante Fluroshield Matizado com 2g cada e 12 pontas aplicadoras

Composição

Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325.

Indicações de Uso

FluroShield é indicado para o selamento de fóssulas e fissuras da face de dentes posteriores que apresentam anatomia complexa, em pacientes com alta atividade cariogênica e em dentes recém erupcionados.

Precauções/Advertências

Recomenda-se a utilização de óculos de proteção para pacientes, profissionais e auxiliares durante todos os procedimentos clínicos. FluroShield selante de fóssulas e fissuras contém monômeros polimerizáveis que podem causar sensibilização da pele (Dermatite Alérgica de Contato) em indivíduos suscetíveis. Após contato, lavar completamente a área com água e sabão.

Se ocorrer sensibilização ou outra reação alérgica, descontinuar o uso.

FluroShield contém metacrilatos que podem ser irritantes para os olhos. Em caso de contato, lavar imediatamente com grande quantidade de água e procurar assistência médica.

Condicionador Dental Gel* contém ácido fosfórico que pode causar queimaduras.

Evitar o contato com pele, tecidos bucais e olhos. Se ocorrer um contato acidental, lavar as áreas com generosa quantidade de água.

Se houver contato com os olhos, lavar imediatamente com grande quantidade de água e procurar por assistência médica.

Condicionador Dental* Gel deve ser dispensado de sua embalagem facilmente, NUNCA USAR FORÇA EXCESSIVA. Certificar-se de que as pontas aplicadoras estejam corretamente fixadas ao corpo das seringas e testar o fluxo de material longe do campo operatório. As pontas aplicadoras

poderão ser levemente curvadas para facilitar o acesso às cavidades, porém, evitar ângulos bruscos pois estes poderão causar a obliteração da cânula das pontas.

Após cada uso, remover a ponta aplicadora e descartá-la, repor a capa protetora na seringa para evitar a evaporação e ressecamento do produto. As seringas deverão ser destacadas após o uso, preferencialmente em lixo hospitalar ou locais apropriados.

Modo de Usar

- Limpar a superfície oclusal, incluindo as fóssulas e fissuras utilizando taça de borracha e pedra pomes, lavar e secar.
- Isolar todo o quadrante a ser selado com dique de borracha ou outro método adequado de isolamento.
- Aplicar o Condicionador Dental Gel* sobre toda a face oclusal e deixar atuar por 30 a 60 segundos. Nos dentes deciduos este tempo poderá ser aumentado em até 90 segundos.
- Remover o Condicionador Dental Gel* com o auxílio de um sugador de saliva de alta potência e um vigoroso spray de água / ar por no mínimo 15 segundos e secar com ar.
- O esmalte corretamente condicionado deverá ter um aspecto fosco e esbranquiçado. Se alguma área não se apresentar com este aspecto, recondicionar por mais 15 a 20 segundos.

Obs.: Se não estiver usando isolamento absoluto, isolar novamente todo o quadrante. Um campo seco é essencial para o sucesso da aplicação do selante.

Evitar que língua, tecidos moles, saliva ou sangue entre em contato com as superfícies condicionadas. Ocorrendo contaminação das superfícies, recondicionar por mais 10 segundos.

- Fixar a ponta aplicadora cuidadosamente ao corpo da seringa, testar o fluxo do material longe do campo operatório.

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial,

Pirassununga - SP - Cep: 13633-412

CNPJ: 31.116.239/0001-55 - www.dentsply.com.br

SAC: 0800 771 2226 | (11) 3046 2222 (Somente no Brasil)

ANVISA: 10186370018 (Fluroshield)

Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396

Indústria Brasileira

Importado e Distribuído por:

Dentsply Finance Co. - Carrera 19B N°84-47 - Bogotá, D.C

Colombia, Registro INVIMA: 2016DM-0014744

- Dispensar o selante diretamente sobre a superfície oclusal a ser selada e com o auxílio de um pincel, estender o selante até o meio dos planos inclinados das cúspides, evitando-se áreas de interferência oclusal.
- Fotopolimerizar cada superfície selada por 20 segundos.
- Antes de remover o isolamento, examinar todas as superfícies para avaliar o grau de cobertura, se necessário, aplicar pequena quantidade de selante estendendo às áreas vizinhas e fotopolimerizar por mais 20 segundos.
- Após a remoção do isolamento, certificar-se da ausência de interferências oclusais, se houver interferências, proceder o ajuste oclusal.

*Condicionador Dental Gel não faz parte deste processo de notificação, sendo regularizado a parte junto a ANVISA.

Cuidados de Conservação

Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e ao abrigo da luz solar direta.

Nº do Lote: Vide Rótulo.

Prazo de Validade: Fluroshield: 24 meses

Uso Único. Uso Profissional.

Proibido Reprocessar

ATENÇÃO: Verifique a correlação da versão destas instruções de uso com o produto adquirido indicado na embalagem.

Para obter gratuitamente estas instruções de uso em formato impresso, solicite nosso atendimento pelo telefone 0800 771 2226 (somente Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com

DENTSPLY Indústria e comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial,
Pirassununga - SP - Cep: 13633-412 -
CNPJ: 31.116.239/0001-55 - www.dentsply.com.br
SAC: 0800 771 2226 | (11) 3046 2222 (Somente no Brasil)
ANVISA: 10186370018 (Fluroshield)
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396
Indústria Brasileira

Importado e Distribuído por:

Dentsply Finance Co. - Carrera 19B N°84-47 - Bogotá, D.C
Colombia, Registro INVIMA: 2016DM-0014744

FluroShield

Sellante para fosas y fisuras

Instrucciones de Uso

Presentación

- 15130030000 - 05 Jeringas de sellador tintado Fluroshield con 2 g cada una y 20 puntas aplicadoras
- 15130040000-05 Jeringas de sellador opaco blanco Fluroshield con 2 g cada una y 20 puntas aplicadoras
- 15130050000 - 01 jeringa de sellador Fluroshield blanco opaco con 2 g cada una y 03 puntas aplicadoras
- 15130060000 - 01 jeringa tintada para sellante Fluroshield con 2 g cada una y 03 puntas aplicadoras
- 15130070000-04 Jeringas de sellador blanco Fluroshield con 2 g cada una y 12 puntas aplicadoras
- 15130080000- 04 Jeringas de sellador tintado Fluroshield con 2 g cada una y 12 puntas aplicadoras

Composición

Monómero de NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil dietolamina, BHT; 2N MEM metacrilato; Canforquinona; Cervit T 1000; Bario silanizado; Fluoruro de sodio; Cabosil TS 720 y Titanox 325.

Indicaciones de Uso

FluroShield es indicado para el sellado en fosas y fisuras de la cara en dientes posteriores que presentan anatomía compleja, en pacientes con alta actividad cariogénica y en dientes recién erupcionados.

Precauciones/Advertencias

Se recomienda el uso de gafas para pacientes, profesionales y asistentes durante todos los procedimientos clínicos.

El sellador de fosas y fisuras FluroShield contiene monómeros polimerizables que pueden causar sensibilización cutánea (dermatitis alérgica por contacto) en personas susceptibles. Después del contacto, lave bien el área con agua y jabón.

Si se produce sensibilización u otra reacción alérgica, suspenda su uso.

FluroShield contiene metacrilatos que pueden irritar los ojos. En caso de contacto, enjuague inmediatamente con abundante agua y busque atención médica.

El gel acondicionador dental* contiene ácido fosfórico que puede provocar quemaduras.

Evite el contacto con la piel, los tejidos bucales y los ojos. Si ocurre un contacto accidental, lave las áreas con abundante agua. Si ocurre contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua y busque atención médica.

El acondicionador de gel dental* se debe dispensar fácilmente de su empaque, NUNCA USE FUERZA EXCESIVA. Asegúrese de que las puntas del aplicador estén colocadas correctamente en el cilindro de la jeringa y pruebe el flujo de material fuera del campo operatorio. Las puntas del aplicador pueden estar ligeramente curvados para facilitar el acceso a las cavidades, sin embargo, evite los ángulos agudos ya que pueden causar la obliteración de la cánula de la punta.

Después de cada uso, retire la punta del aplicador y deséchelo, vuelva a colocar la cubierta protectora en la jeringa para evitar la evaporación y el secado del producto. Las jeringas deben separarse después de su uso, preferiblemente en la basura del hospital o en lugares apropiados.

Modo de Usar

- Limpie la superficie oclusal, incluidos las fosas y las fisuras con un copa de goma y piedra pómez, lave y seque.
- Aislar todo el cuadrante para ser sellado con un dique de goma u otro método de aislamiento adecuado.
- Aplicar el Acondicionador Dental Gel* en toda la cara oclusal y dejar actuar por 30 a 60 segundos. En los dientes deciduos este tiempo puede ser aumentado en hasta 90 segundos.
- Remover el Acondicionador Dental Gel* con la ayuda de un succionador de saliva de alta potencia y un vigoroso rociar de agua/aire como Mínimo 15 segundos y secar con aire.
- El esmalte debidamente acondicionado debe tener una apariencia mate y blanquecina. Si alguna área no tiene este aspecto, reacondicione por otros 15 a 20 segundos.

Nota: Si no está usando el aislamiento absoluto, aisle todo el cuadrante de nuevo. Un campo seco es esencial para la aplicación exitosa del sellante.

Evitar que la lengua, los tejidos blandos, la saliva o la sangre entren en contacto con las superficies acondicionadas. Si se produce contaminación en las superficies, reacondicionar durante otros 10 segundos.

- Fije la punta aplicadora con cuidado en el cuerpo de la jeringa, pruebe el flujo de material fuera del campo de operación.
- Distribuya el sellante directamente sobre la superficie oclusal a sellar y con la ayuda de un cepillo, extienda el sellante hasta la mitad de los planos inclinados de las cúspides, evitando las áreas de interferencia oclusal.
- Fotopolimerizar cada superficie sellada durante 20 segundos.

DENTSPLY Indústria e comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial,
Pirassununga - SP - Cep: 13633-412
CNPJ: 31.116.239/0001-55 - www.dentsply.com.br
SAC: 0800 771 2226 | (11) 3046 2222 (Somente no Brasil)
ANVISA: 10186370018 (Fluroshield)
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396
Indústria Brasileira

Importado e Distribuído por:

Dentsply Finance Co. - Carrera 19B N°84-47 - Bogotá, D.C
Colombia, Registro INVIMA: 2016DM-0014744

- Antes de retirar el aislamiento, examine todas las superficies para evaluar el grado de cobertura, si es necesario, aplique una pequeña cantidad de sellante que se extienda a las zonas vecinas y fotopolimerice durante otros 20 segundos.
- Después de quitar el aislamiento, asegúrese de que no haya interferencia oclusal, si hay interferencia, proceda al ajuste oclusal.

*El Gel Acondicionador Dental no forma parte de este proceso de notificación, siendo regularizado con ANVISA.

Cuidados de Conservación

Almacenar a temperatura ambiente (15°C a 30°C) y lejos de la luz solar directa.

Numero de lote: Ver etiqueta.

Plazo de Validez: Fluroshield: 24 meses

Uso Único: Uso Profesional.

REPROCESAMIENTO PROHIBIDO

ATENCIÓN: Verifique la correlación de la versión de estas instrucciones de uso con el producto comprado indicado en el paquete. Para obtener estas instrucciones de uso de forma gratuita en formato impreso, solicite nuestro servicio llamando al 0800771 2226 (solo en Brasil) o por correo electrónico a atendimento@dentsplysirona.com

DENTSPLY Indústria e comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial,
Pirassununga - SP - Cep: 13633-412 -
CNPJ: 31.116.239/0001-55 - www.dentsply.com.br
SAC: 0800 771 2226 | (11) 3046 2222 (Somente no Brasil)
ANVISA: 10186370018 (Fluroshield)
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396
Indústria Brasileira

Importado e Distribuído por:

Dentsply Finance Co. - Carrera 19B N°84-47 - Bogotá, D.C
Colombia, Registro INVIMA: 2016DM-0014744