

Cimentos Odontológicos (2101090)

DR | Descrição: Ultra-Blend™ plus é um exclusivo material de base para forramento, radiopaco, fotopolimerizável e que apresenta adesão à dentina, contendo hidróxido de cálcio e hidroxiapatita de cálcio em uma base de dimetacrilato de uretano (UDMA). Ultra-Blend™ plus está disponível nas seguintes cores: dentina e branco opaco. É uma resina de alta carga (considerando que se trata de forramento) com contração e absorção de água mínimas. Ultra-Blend™ plus tem viscosidade maior do que os forramentos convencionais, eliminando a necessidade de aplicador tipo bola.

Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto: Acompanha o produto seu respectivo Manual de Instruções de Uso e, dependendo da apresentação do produto, pontas aplicadoras.

Seringa contendo 1,2 mL



Indicação de uso: Ultra-Blend™ plus é auto adesivo e é utilizado como revestimento de cavidade e/ou material base anteriormente à aplicação de materiais restauradores.




Instruções de uso:

1. Use Ultra-Blend plus para uma exposição pequena sem hiperemia e junto à polpa (rosada). Para uma exposição maior e/ou polpa com hiperemia, deve ser iniciado o tratamento endodôntico (Fig. 1).
2. Desinfete a cavidade com Consepsis (clorexidina a 2%). Seque com cuidado e não há necessidade de enxaguar (Fig. 2).
3. Aplique primeiro Ultra-Blend plus com a ponta Black™ Micro Tip sobre a dentina seca na margem de exposição (ou sobre a dentina



rosada fina); cubra a exposição e fotopolimerize com o fotopolimerizador LED VALO na sua potência Standard durante 10 segundos (para luzes com uma saída <600mW/cm2 polimerizar durante 20 segundos ou para luzes com uma saída >600mW/cm2 polimerizar durante 10 segundos). Mantenha dentinas saudias em toda a volta da área coberta com Ultra-Blend plus para posterior adesão do restaurador (Fig. 3).

4. Faça o condicionamento ácido com Ultra-Etch™, aplique adesivo Peak™ de acordo com as instruções e restaure com resina composta (Fig. 4).

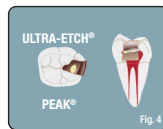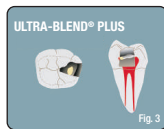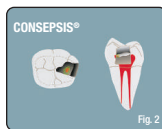

Precauções e advertências:

1. As pontas são descartáveis;
2. Recolocar as tampas nas seringas entre um paciente e outro.
3. Qualquer resina pode causar sensibilidade ao paciente, provocando reação alérgica se o indivíduo já apresentar sensibilidade. Lavar muito bem a área exposta para remover o material. No caso de ocorrência de dermatite, urticária ou qualquer outra manifestação alérgica, consultar um médico.
4. Recomendamos expressamente o uso dos Protetores de Seringa para promover uma barreira protetora contra contaminação cruzada.
5. Para evitar a contaminação cruzada, desinfetar e limpar a seringa com um desinfetante de nível intermediário entre utilizações e/ou utilizar uma cobertura de seringa descartável. Se for utilizada a cobertura da seringa, remover a ponta/cânula, recolocar a tampa e descartar a ponta/cânula e a cobertura da seringa.
6. Redirecionar o foco odontológico para evitar a polimerização prematura.

Armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto:

- Manter o Ultra Blend Plus protegido contra calor/luz solar direta.
- Conservar entre 2 e 27°C. Após aberto, conservar a temperatura de refrigeração, entre 2 e 8°C, quando não estiver em uso.

Condições para descarte:

- Caso a embalagem esteja violada não utilizar o produto. Descartar e utilizar outro que esteja com embalagem íntegra.
- Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para descarte de materiais odontológicos.

Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde:

Ultra-Blend plus quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

NOTA: Para obter as fichas de segurança e informações adicionais sobre a utilização de Ultra-Blend™ plus e de outros produtos relacionados, visite: www.ultradent.com.br.

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.

AS PONTAS APLICADORAS SÃO DE USO ÚNICO



VALIDADE

REF

NÚMERO DO CATÁLOGO

LOT

NÚMERO DO LOTE

PROIBIDO
REPROCESSAR**R_x**SOMENTE PARA
USO PROFISSIONALCONSULTAR AS INSTRUÇÕES
PARA UTILIZAÇÃO

RISCO À SAÚDE

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO
ACONSELHADA (2°C A 27°C)**ANVISA nº:** 80279910025**Responsável técnico:** Claudia Cavani Kurozawa**CRQ/ SP nº:** 04261572**Fabricado por:**

Ultradent Products Inc.
505 West 10200 South
South Jordan, UT 84095 USA
Ultradent do Brasil Produtos
Odontológicos Ltda.
CNPJ: 06.295.846/0001-82
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121
Itaici – Indaiatuba – SP
CEP: 13340350
0800 773 5100

Importado e distribuído por:

Ultradent do Brasil Produtos
Odontológicos Ltda.
www.ultradent.com.br

51488.9 301121

2/2