



## AVENTAL DESCARTÁVEL HNDESC

**Nome do Produto:**

Avental Descartável HNDESC

**Nome Técnico do Produto:**

Vestimenta Hospitalar

**Indicação e Finalidade:**

Indicado para proteção do tronco e membros superiores do usuário durante procedimentos cirúrgico-hospitalares, laboratoriais e manuseio de materiais contaminados, podendo ser utilizado por equipe médica, enfermeiros e pacientes com a finalidade de proteger contra respingos de fluidos contaminantes e corpóreos.

**Forma de Apresentação do Produto:**

Embalagem primária: saco plástico com 10 unidades.

Embalagem secundária: caixa de papelão ou fardo plástico (quantidade de acordo com solicitação do cliente considerando a capacidade das embalagens).

**Modelos:**

Avental Manga Longa

Avental Manga Curta

Avental Sem Manga

Avental Punho Lastex

**Modo de Uso:**

- 1.Retirar o Avental descartável da embalagem;
- 2.Colocar sobre a roupa para proteção;
- 3.Deve ser usado de acordo com o protocolo da instituição e ou hospital.

**Composição:**

Os Aventais HNDESC são confeccionados em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno.

**Condições de Armazenamento e Transporte:**

As embalagens devem ser armazenadas e transportadas em temperatura ambiente. Deve evitar a exposição direta ao calor, luz e umidade.

Os aventais não devem ser armazenados diretamente sobre o chão, sendo assim, recomenda-se a utilização de prateleiras com no mínimo 20cm de altura.

O produto deve ser armazenado de forma a impedir qualquer dano ou alteração das suas características, e em sua embalagem.

**Validade do Produto:**

3 anos após a data de fabricação.

**Efeitos adversos:**

- Não há

**Advertência:**

- Produto de uso único;
- Produto não estéril;
- Proibido reprocessar;
- Descartar após o uso, em recipiente para lixo infectante;
- Não utilize o produto se a embalagem estiver danificada, aberta ou rasgada.

**Fabricado por:**

Razão Social: HN DESC Comercio E Confeção de Produtos Hospitalares Ltda.

Endereço: Rua Jose Lopes,222 - Parque Industrial Araucária - Caieiras-SP

CNPJ: 10.235.337/0001-31

Fone: (11) 4441-5000

Site: www.hndesc.com.br

E-mail: sac@hndesc.com.br

Indústria Brasileira

Anvisa Nº: 80719720001

Responsável Técnica: Janete Prates do Amaral CRF/SP 43.695

Documento:	Elaborado Por:	Data Elaboração:	Revisão Nº:	Data Revisão:
IU-HNDESC-01	SGQ	15/10/2021	00	00/00/0000