

ESPIRAIS SWIVEL

SAIBA COMO OBTER OS
MELHORES RESULTADOS

Jota



ESPIRAIS SWIVEL

INSTRUÇÕES DE USO

Jota



Sentido correto de rotação:
Anti-horário (a favor das cerdas).



**Utilize o polidor em baixa
velocidade (7.000 a 9.000RPM).**



**Aplique pressão leve durante a
operação do instrumento.**



**Utilize a irrigação com água
sempre que possível.**



**Polidores Diamantados para Resinas Compostas.
Não precisa de pasta de polimento.**

ESPIRAIS SWIVEL

jota




Sentido correto de rotação:
Anti-horário (a favor das cerdas).

USO CORRETO
POLIDORES SWIVEL




UTILIZE SEMPRE
NO SENTIDO A
FAVOR DAS
CERDAS!

USO INCORRETO
POLIDORES SWIVEL

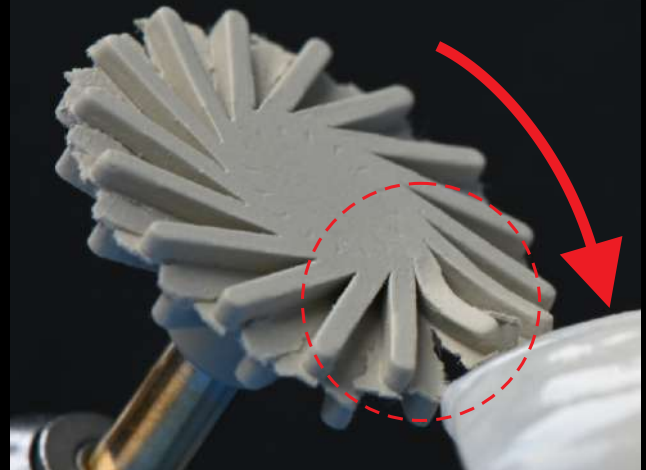

USO CORRETO

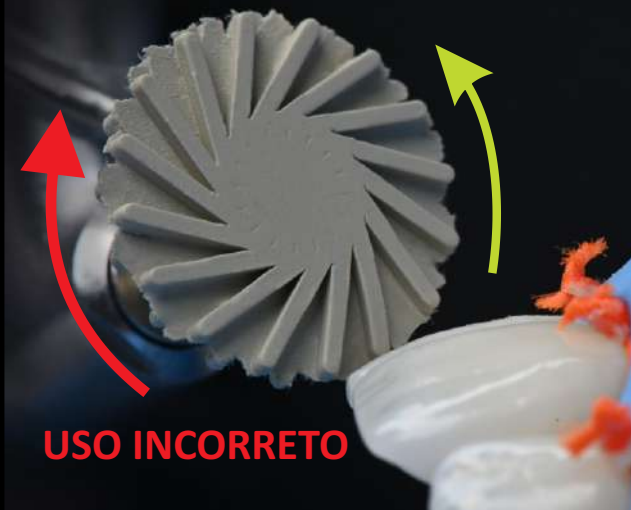

USO INCORRETO

USO INCORRETO
POLIDORES SWIVEL



jota

TRADITION - PRECISION - QUALITY

FROM SWITZERLAND 



COMPRE AQUI!



48 9 9135 6776



jotadobrasil.com



JOTA em Português

JOTA do Brasil Rotary Instruments
Rua Orlando Phillipi 100, Sala 203
CEP 88032 - 700 Florianópolis, SC, Brasil
Phone +55 (48)3365-4100
info.brasil@jota.ch
www.jotadobrasil.com  **SWITZERLAND**

Distribuidor JOTA: