

Zymedet Extra 7 enzimas

DETERGENTE ENZIMÁTICO

O **ZYMEDET EXTRA 7 ENZIMAS** é um **DETERGENTE MULTIENTZIMÁTICO** atuante com 7 enzimas compostas por protease, amilase, lipase, mananase, peptidase, carbohidrase e celulase que combinados com tensoativos de baixa espuma tem ação de limpeza eficiente, sendo indicado especificamente para a limpeza de instrumentos cirúrgicos, artigos médicos e odontológicos, manualmente e/ou através de lavadoras automáticas de limpeza, como lavadoras termodesinfetadoras e ultrassônicas. Tem a finalidade de remover as sujidades orgânicas e evitar a formação de compostos insolúveis na superfície desses dispositivos em locais de difícil limpeza e com pouca formação de espuma.



7 enzimas



Não Espumante



Limpeza manual e automatizada

Diluição única
1ml/L

SEGUIMENTO



Hospitalar



Veterinário



Odonto

7 ENZIMAS

PROTEASE

CELULASE

PEPTIDASE

MANANASE

CARBOHIDRASE

LIPASE

AMILASE

Frasco
Anatômico

Modo de Uso

Limpeza Manual: Em um recipiente limpo, diluir o produto previamente em água. A diluição deverá ser de 1 ml do produto para 1000 ml (1L) de água (1:1000). Cada 1 ml de produto rende 1001 ml de solução pronta para limpeza. Deixar agir por 5 minutos, e se necessário friccionar os instrumentos/ artigos com as mãos vestidas de luvas látex, retirar o material da solução e enxaguar com água em abundância. **Limpeza automatizada:** Este produto pode ser utilizado em máquinas de limpeza ultrassônicas ou termodesinfetadora desde que previamente testados. Para isso, proceder conforme descrito: Diluir ou programar a diluição do produto. A diluição deverá ser de 1 ml do produto para 1000 ml (1L) de água (1:1000). Cada 1 ml de produto rende 1001 ml de solução pronta para limpeza, deixar agir por 5 minutos ou seguir as instruções do fabricante do equipamento. Na sequência enxaguar com água em abundância.

Armazenamento

Conservar em temperatura ambiente. Proteger da luz, do calor e da umidade em excesso.

Precauções e Advertências no Uso

Advertências: Não misturar com outros produtos. Recomendado a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI's) adequados, tais como luvas, máscara, óculos de proteção e avental.

Precauções: Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos ou com a pele. Não reutilizar a embalagem vazia. Manter o produto em sua embalagem original. Manter o produto armazenado em local seguro. Proteger do calor.

Primeiros Socorros: Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.

Disque Intoxicações: 0800-722-6001

ATENÇÃO: MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Composição

Protease, Protease (Peptidase Subtilisin), Amilase, Lipase, Mananase, Celulase, Carboidrase, Hexil D-Glipiranosídeo (2,4% p/p), 2-Etilexanol etoxilato (2,4% p/p), estabilizantes, alcalinizantes, solventes, conservantes, tensoativos, tamponante, umectante, emulsificante, atenuador de espuma, corante e veículo. Faixa de pH do produto puro 6,0 - 8,5.

Dados logísticos

PROD.	APRES.	CLASSIF.	VAD.	NCM	CX. MB.	REGISTRO	EAN	DUN14	PESO UND	PESO CX.	DIMENSÃO CX (COMPLARGXALT)	CUBA. DA CX.
08974	1L	SANEANTES	24	35079019	12	326100037	7908346903760	17908346903767	1,08	12,96	34x26x26 cm	0,023
08973	5L	SANEANTES	24	35079019	4	326100037	7908346903777	17908346903774	5,35	21,40	37,5x28,5x29,5 cm	0,032