	BOLETIM TÉCNICO	BT008 00 Página 1 de 2
	ÁLCOOL 70 PROLINK	Revisado em: 04/2025

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

O ÁLCOOL 70 PROLINK é destinado à desinfecção de superfícies fixas em ambientes hospitalares, clínicos e farmacêuticos. E desinfecção de artigos não críticos, como vidros, termômetros, estetoscópios, otoscópios, artigos metálicos (material odontológico), etc.. Uso Assistência à Saúde. Possui amplo espectro de atuação, sendo considerada em testes laboratoriais satisfatória na eficácia bactericida frente à *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Salmonella choleraesuis*. Seu componente ativo não é corrosivo, não deixa resíduos, odor característico alcoólico, sendo sua aplicação simples e cotidiana pelos profissionais de saúde.

2. ESPECIFICAÇÃO


Características	Padrão de Aceitação
Aspecto	Líquido límpido
Cor	Incolor e Transparente
Odor	Característico
pH	4,50 – 7,50
Massa específica	0,863 – 0,873 g/cm ³ 20 °C
Teor Alcoólico	67,70 – 72,00º INPM

3. MODO DE USAR

Superfícies Fixas: Lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar o produto deixando em contato com 10 minutos. Enxaguar se necessário. **Artigos Não Críticos:** Lavar, enxaguar e secar os artigos. Friccionar os artigos com o produto deixando-o umedecido por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizar o mais breve possível.

4. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS NO USO

Evitar contato do produto com material sensível ao álcool. Não é indicado para uso em acrílicos. Pode enrijecer borrachas e tubos plásticos. Não Ingerir. Manter afastado do fogo e do calor. Não perfurar a tampa. Não derramar sobre o fogo. Não reutilizar a embalagem vazia. Manter o produto em sua embalagem original. Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço Médico mais próximo. Não de nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

	BOLETIM TÉCNICO	BT008 00 Página 2 de 2
	ÁLCOOL 70 PROLINK	Revisado em: 04/2025

5. COMPOSIÇÃO

Álcool etílico e Veículo. Princípio ativo: Álcool Etílico.

6. EMBALAGEM

Frasco plástico 1L;

Galão plástico 5L.

7. ARMAZENAMENTO

Conserve o produto em local seguro e protegido do calor.

8. ANVISA

AFE MS 3.02.610-5

PRODUTO SANEANTE REGISTRADO: ÁLCOOL 70 PROLINK – Registro M.S. nº: 326100019

NUMERO DE PROCESSO: 25351.164580/2011-99.

9. ANEXOS

N.A.