

## INSTRUÇÕES DE USO

# CARIOSTATIC

## Agente Inibidor da Carie

### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Cariostatic AF do BRASIL é uma solução de diamino fluoreto de prata a 12% ou 30%. É largamente utilizado na odontologia como agente inibidor da cárie dental, esta proteção preventiva e causada pela presença da prata. Tendo também uma ação de remineralização preventiva, como ação curativa, no caso de paralização de lesões cáriosas e ação anti-microbiana.

### 2. APRESENTAÇÃO

1 frasco com 5 ou 10ml de CARIOSTATIC 12% e 30%.

### 3. COMPOSIÇÃO

Nitrato de Prata, Hidróxido de Amônio, Ácido Fluorídrico e Veículo aquoso.

### 4. INDICAÇÃO DE USO

Indicado como inibidor da cárie dental, impedindo a formação da placa bacteriana e a desmineralização da superfície do esmalte. Evita a progressão da cárie já instalada. Utilizado especialmente para cárie em crianças e de mamadeira noturna. Atua tanto no esmalte quanto na dentina.

### 5. AÇÃO DO PRODUTO

O tratamento da cárie como solução de diamino fluoreto de prata, que é cariostática e preventiva, não sendo invasiva e portanto sem restauração cavitária, é um importante aliado na recuperação da saúde bucal de crianças menores. O diamino fluoreto de prata forma com a superfície dentária, compostos estáveis de fluoreto de cálcio, fosfato de prata e proteína de prata, que conferem maior resistência à estrutura dentária.

### 6. CONSERVAÇÃO/ ARMAZENAMENTO



ARMAZENAR EM LOCAL SECO A TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C).

### 7. INSTRUÇÕES PARA USO EM ENDODONTIA

- Realizar a limpeza do dente;
- Proteger os tecidos moles ao redor com vaselina ou isolamento absoluto;
- Aplicar o produto (2-3 minutos);
- Lavar o dente.

Forma de tratamentos:

- Tratamento inicial: realizar uma aplicação por semana, durante quatro semanas;
- Tratamento de manutenção: realizar uma aplicação a cada seis ou doze meses, dependendo da necessidade.

### 8. CONTRA INDICAÇÕES

Não há contraindicações.

Não deve ser utilizado em pessoas com comprovada sensibilidade ao produto.

### 9. ADVERTÊNCIAS

- Não ingerir;
- Não utilizar com prazo de validade vencido;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Somente para uso odontológico;
- Manipular de acordo com as instruções.

### 10. CUIDADOS ESPECIAIS

- Impedir o contato com a pele e olhos (produto cáustico);
- Impedir o contato com tecidos moles. Isolar com dique de borracha ou vaselina;
- O produto causa manchas escuras. Proteger mãos, vestimentas e demais áreas de contato durante a aplicação do produto e não manusear a embalagem;
- Utilizar solução de iodo para remover manchas causadas pelo cariostático na pele.

### 11. MANIPULAÇÃO

Após o uso manter a embalagem bem fechada.

### 12. INTERAÇÕES:

Não há.