



Como cuidar do
Kit Acadêmico

dental
Cremer

Cuidando do seu Kit Acadêmico

Você sabe que esses equipamentos têm um alto custo e são facilmente perdidos se utilizados de maneira errada, por isso, preparamos algumas dicas para que os seus durem muuuito mais!


Armazenamento

O seu kit acadêmico vem em uma embalagem espumada, com formato cortado à laser, especialmente para o tamanho da sua caneta.

É para ficar bonitinho? Não. **Ele serve para aumentar a vida útil do seu kit.** Ainda mais na fase acadêmica, quando normalmente eles não ficam quietinhos, indo pra lá e pra cá com nossas muitas malas e compartimentos de plástico que adoramos.

Imagine se você guardar o kit em um pote qualquer e ele cair no chão? Pois é. **Não jogue a maleta original fora e transporte o seu kit sempre dentro dela,** mesmo depois de formado.

Saiu do consultório? **Leve-o na embalagem específica e não corra riscos.**

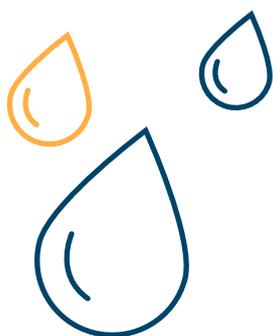


Limpeza

As turbinas são autoclaváveis. **Faça a assepsia convencional, lubrifique bem, embale e autoclave.**

Lubrificação

Sabe quando a gente ouve “beba água regularmente”? O óleo para a caneta é como a água para nós. **Caso você a utilize diariamente, lubrifique pelo menos toda noite.**

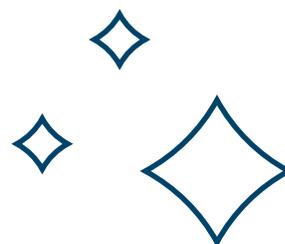


Cuidando do seu Kit Acadêmico

Brocas

Na turbina, a parte que inserimos a broca se chama pinça e ela influencia diretamente na durabilidade do equipamento e nos resultados do seu procedimento.

Cuidado com o uso de brocas velhas.

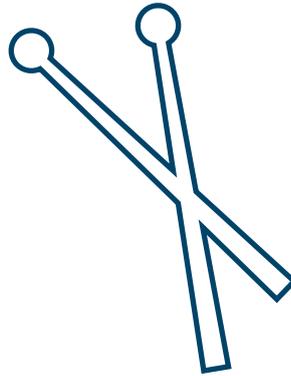

Temperatura

Refrigere sua turbina de alta rotação abrindo a água.



Uso adequado

Não adianta ter um excelente e novíssimo kit em mãos e não utilizá-lo adequadamente. Refrigere, use a baixa rotação para procedimentos com sua indicação e faça o mesmo com a alta rotação, respectivamente.

Manutenção preventiva

Faça de acordo com as instruções do fabricante.

