



IODONTOSUL
PRODUCTS FOR HEALTH



FICHA TÉCNICA

FIO DENTAL

www.iodontosul.com.br

ÍNDICE

1. PRODUTO	3
2. APRESENTAÇÃO	3
3. REGISTRO M. S.	3
4. NCM	3
5. VALIDADE	3
6. COMPOSIÇÃO	3
7. INDICAÇÃO	3
8. MODO DE USO	4
9. RESTRIÇÕES DE USO	4
10. RECOMENDAÇÕES	4
11. ARMAZENAMENTO	4
12. FABRICADO POR	4

1. PRODUTO

Fio Dental Hortelã

2. APRESENTAÇÃO

Apresentação em 5 sabores diferentes:

- Menta - Morango - Tangerina - Hortelã - Uva.

Apresentação em 3 tamanhos diferentes:

- 25 metros de fio dental - 50 metros de fio dental - 100 metros de fio dental;

Embalagem Primária: Estojo plástico em polipropileno contendo o fio dental;

Embalagem Secundária: Cartão triplex e blister de PVC transparente contendo 1 estojo de fio dental;

3. REGISTRO M.S.

80442020044

Risco: Classe I – Baixo Risco

4. NCM

33062000

CÓDIGO EAN

Menta 25 metros: 7898936468475

Menta 50 metros: 7898936468529

Menta 100 Metros: 7898936468574

Morango 25 metros: 7898936468505

Morango 50 metros: 7898936468550

Morango 100 metros: 7898936468604

Tangerina 25 metros: 7898936468512

Tangerina 50 metros: 7898936468567

Tangerina 100 metros: 7898936468611

Uva 25 metros: 7898936468499

Uva 50 metros: 7898936468543

Uva 100 metros: 7898936468598

Hortelã 25 metros: 7898936468482

Hortelã 50 metros: 7898936468536

Hortelã 100 metros: 7898936468581

5. VALIDADE

36 meses

6. COMPOSIÇÃO

- Polipropileno, cera mineral e aroma de acordo com o modelo.

7. INDICAÇÃO

O produto é indicado para higiene bucal.

8. MODO DE USO

- Enrole cerca de 50cm do fio dental Iodontosul na pontas dos dedos médio, mantendo-o esticado;
- Deslize suavemente entre os dentes e um pouco abaixo da linha da gengiva. Realize movimentos para cima e para baixo para a remoção de resíduos alimentares e placa bacteriana;
- Repita o procedimento em todos os espaços entre os dentes, utilizando sempre uma porção limpa do fio para cada um dos espaços interproximais.

9. RESTRIÇÕES DE USO

Devido às características físicas do produto, o mesmo deve ser mantido fora do alcance de crianças.

10. RECOMENDAÇÕES

O uso em crianças deve ser supervisionado por um adulto.

11. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e protegido da luz, em temperatura inferior à 25°C e com umidade relativa do ar entre 50% e 70%.

12. FABRICADO POR

Souza & Leonardi LTDA (07.707.681/0001-71)
Rua Vítor Valpério, 343 - bairro Anchieta, Porto Alegre/RS - Brasil
CEP: 90.200-230 Telefone (51) 3374-2978
iodontosul@iodontosul.com.br
A.F.E. N° 8.04.420-2