

Renfert

making work easy

NOVO!

Agente de limpeza

help:ex plaque p

Remover + Neutralizador | Ref. 6700 0000

Limpeza de placa bacteriana, tártaro e contaminação em próteses totais, placas oclusais e aparelhos ortodônticos.



**Antigo líquido de
limpeza - Sympro
Fluído Universal**



Produto médico

MD



Fórmula atualizada



Embalagem prática em sachês
Removedor + Neutralizador



20 aplicações

Uso com o equipamento
de limpeza **SYMPRO**
ou equipamento de
limpeza ultrassônica.*



* Seguir obrigatoriamente o manual
de cada equipamento, bem como
manual do agente de limpeza

Antigo líquido Sympro Fluido Universal

Novo agente de limpeza **help:ex plaque p**

Nova fórmula, nova embalagem, mais praticidade e segurança nos processos de limpeza do consultório ou laboratório de próteses dentárias.

Ref. 6700-0000

20 sachês removedor 20gr

20 sachês neutralizador 4,5gr



Itens necessários para limpeza com o **novo help:ex plaque p**:

1 sachê removedor

Equipamento SYMPRO
com copo de limpeza



75gr de pinos de limpeza



1 sachê neutralizador

Pinça SYMPRO

Peça magnética

! SYMPRO: antes da utilização, deve ser observado obrigatoriamente o manual de utilização do equipamento, bem como o manual do agente help:ex



Limpeza combinando o **help:ex plaque p** com o equipamento **SYMPRO**:

Verificar as indicações especiais de perigo para a utilização



1

Coloque os pinos, 200ml de água e a prótese



2

Aos poucos coloque o sachê com o **help:ex** removedor



3

Iniciar o processo no **SYMPRO**



4

Retire a peça com a pinça e lave em água corrente



5

Adicione o neutralizador **help:ex**, feche o copo



6

Inicie o processo no **SYMPRO** por 1 minuto



7

Descarte



Após a solução neutralizada, pode ser descartada respeitando as disposições nacionais.

Descarte na Na Alemanha - a solução neutralizada pode ser descartada no esgoto (WHG – §55). O líquido de limpeza usado e não neutralizado deve ser descartado como resíduo especial.

! **SYMPRO: antes da utilização, deve ser observado obrigatoriamente o manual de utilização do equipamento, bem como o manual do agente help:ex**





Sympro e Help:ex plaque p

Limpeza de placa bacteriana e tártaro de próteses totais e parciais de resina acrílica ou protocolo cerâmico, placas miorelaxantes, placas oclusais e para apnéia, aparelhos ortodônticos.



Antes e depois de próteses limpas utilizando a combinação do Sympro com o **novo help:ex plaque p**

