



MANUAL DO USUARIO

Martelete Pneumático Evolution

Com Registro - Acionamento Manual

A garantia da ESSENCE DENTAL será válida desde que o equipamento seja utilizado corretamente (ao uso que se destina), conforme as instruções contidas neste manual e sob a apresentação da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data e o nome do revendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente preenchido.

Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos e seguro do envio é de responsabilidade do usuário.

A garantia da ESSENCE DENTAL NÃO TERÁ VALIDADE caso:

- Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegíveis de alguma forma.
- O número de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível.
- Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela ESSENCE DENTAL.
- Na instalação do equipamento não forem observados as especificações e recomendações quanto às condições descritas neste manual, tais como, nivelamento do equipamento, adequação do local para instalação, tensão elétrica, condições hidráulicas e pneumáticas compatíveis.
- Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligência, descarga na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo.
- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em razão do uso diverso ao especificado no manual.

Itens Excluentes de garantia:

- Qualquer acessório ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do equipamento, tais como: iluminação, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas, eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusíveis, lamina de corte, entre outros que não caracterizam defeito de fabricação, independente do prazo de garantia.

Componentes:



Foto meramente ilustrativa

* A serra não acompanha o produto, vendida separadamente

Todas as partes, acessórios ou materiais a serem utilizados são de uso exclusivo do produto. O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.

Aviso legal:

As informações contidas neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ficando ao seu critério fazer alterações às especificações e atributos sem aviso prévio. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissão prévia por escrito da ESSENCE DENTAL.

Agradecimento

Parabéns, você acaba de adquirir MARTELETE PNEUMÁTICO EVOLUTION da ESSENCE DENTAL.

Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurança, a fim de oferecer o que há de melhor no mercado em relação à tecnologia, funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilância sanitária.

Atenção:

É imprescindível que sejam lidas todas as informações contidas neste manual, para tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este equipamento oferece, evitando o uso inadequado, possíveis acidentes e danos ao equipamento. Após leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia em local seguro.

Aplicação:

Utilizado para separar bases metálicas dos modelos a serem transportados para o articulador e demuflagem total e/ou parcial das próteses, e também como troquelizador.

Características e benefícios:

- Corpo confeccionado em alumínio, tornando o equipamento mais leve e isento de corrosão.
- Possui duas pontas, uma tipo punção (cônica) e outra tipo fenda que se adequa a qualquer tipo de remoção e abertura de mufas, diminuindo o risco de quebra da prótese quando está sendo demuflada.
- Pode ser utilizado para abertura de mufas tanto de metal quanto de microondas, sem danificá-las.
- Possui arco de serra, facilitando e agilizando os processos de troquelização.
- Elimina o uso de martelo e chave de fenda entre outros instrumentos para a demuflagem ou troquelização, reduzindo o risco de acidentes.
- Acompanha um "T" para instalar na rede pneumática.
- 12 meses de garantia para defeitos de fabricação;
- Baixo custo para peças de reposição

Versão 00 04/22

1

Instalação e uso inicial:

1º passo - Interrompa a rede pneumática e conecte as pontas da mangueira nas extremidades da conexão "T" que acompanha o MARTELETE PNEUMÁTICO (para ligar o equipamento na rede pneumática, escolha previamente o local a ser instalado).

Obs.: A conexão "T" fornecida é para mangueira de Ø 1/4.

2º passo - Conecte a mangueira do MARTELETE PNEUMÁTICO no centro da conexão "T".

Funcionamento:

Demuflagem

1º passo - Escolha a ponta que irá utilizar e encaixe no MARTELETE PNEUMÁTICO.

2º passo - Gire a válvula abre/fecha na parte traseira do MARTELETE PNEUMÁTICO em sentido anti-horário para acionar e para desligar gire no sentido horário

Troquelização

1º passo - Coloque a serra no arco pressionando as pontas até encaixar os pinos da serra nos rasgos em seguida encaixe no MARTELETE PNEUMÁTICO.

Obs.: Os dentes da serra devem ficar voltados para frente do arco.

2º passo - Gire a válvula abre/fecha na parte traseira do MARTELETE PNEUMÁTICO em sentido anti-horário para acionar e para desligar gire no sentido horário

Obs.: Uso obrigatório de filtro de ar, para evitar que ocorra umidade no equipamento.

Filtro de ar não acompanha o produto.

Conselhos:

- Manter o equipamento longe de inflamáveis.
- Manter o equipamento ao menos 40 cm de fontes de calor.
- Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos.
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
- Nunca deixe as mangueiras encostar-se a superfícies quentes.
- Manter o equipamento fora do alcance de crianças ou pessoas sem habilidade para o manuseio adequado.

3

Versão 00 04/22

Assistência Técnica:

Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, por favor, leia atentamente todas as instruções que se encontram neste manual, antes de entrar em contato.

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL não esteja funcionando corretamente ou tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e NF/Recibo de compra através do:

E-mail: sac@essencedental.com.br (preferencialmente).

Telefone: (16) 3334-2000 Ramal 301 ou 302.

Características Técnicas:

Modelo: Martetele Pneumático Evolution

Peso peça de mão com ponta: 0,156kg

Peso bruto: 0,430 Kg

Pressão de uso: 80 a 100lbs.

Dimensões:

Corpo: 140mm (comprimento) e 25mm (diâmetro).

Corpo com ponta: 185mm (comprimento) e 25mm (diâmetro).

Mangueira 2,0 metros



Pedal Pneumático
Acessório vendido separadamente

6

Versão 00 04/22

Manutenção e limpeza:

- Importante: Para evitar danos ao equipamento lubrifique o MARTELETE PNEUMÁTICO antes de cada utilização no orifício indicado (oil), para isso retire o parafuso coloque uma gota de óleo lubrificante e feche o parafuso novamente.
- Para realização da limpeza utilize um pano úmido com detergente líquido neutro ou álcool.
- Nunca submergir o aparelho em água ou qualquer líquido, nem o coloque debaixo da torneira.

Diagnósticos de falhas:

Falha apresentada	Causa provável	Solução
Equipamento sem força na demuflagem ou troquelização	Pressão do ar insuficiente	Aumente a pressão da rede de ar
	Falta de lubrificação	Lubrifique sempre que utilizar.
Equipamento não funciona	Sem ar comprimido na rede	Verifique o compressor e o filtro de ar.
	Mangueiras dobradas	Verifique as mangueiras e corrija.
Equipamento funcionando direto sem acionamento	Problema no válvula de acionamento	Entre em contato com assistência técnica
Vazamento	Conexões mal conectadas	Verifique o encaixe das mangueiras nas conexões.

Termos de garantia:

Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricação, a ESSENCE DENTAL cobre os custos de mão de obra e reposição das peças, durante o prazo de doze (12) meses. Sendo os três (3) primeiros meses de garantia legal e os nove (9) últimos meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de compra.

Caso seja realizada a substituição do equipamento ou peça durante a garantia, o prazo não será estendido, ou seja, a data inicial válida continua sendo a informada na nota fiscal de compra.

Versão 00 04/22

4