

Anteriores Superiores Upper Anteriors

		Largura (mm) das 6 anteriores em curva.	Comprimento (mm) do Central sem Colo.	Largura (mm) do Central.
R1				
□		42,1	7,8	8,5
R2				
△		41,7	8,2	9,4
R3				
△		44,5	8,3	10,1
R4				
○		47,1	8,8	10,3
R5				
△		50,2	9,3	12,1
V3				
△		41,7	8,2	9,6
V4				
△		46,7	8,6	10,5
A2				
○		43,5	8,0	9,0
A3				
○		44,5	8,5	9,8
Z1				
△		39,2	7,4	8,4
Z3				
△		42,2	7,5	8,8
Z4				
△		43,5	7,9	9,4
C1				
△		41,5	7,8	9,7

		Largura (mm) das 6 anteriores em curva.	Comprimento (mm) do Central sem Colo.	Largura (mm) do Central.
C2				
△		43,6	8,2	9,6
X1				
□		45,7	8,2	9,6
X2				
□		46,0	8,6	9,9
X4				
□		51,2	9,2	10,4

Anteriores Inferiores Lower Anteriors

		Largura (mm) das 6 anteriores em curva.	Comprimento (mm) do Central sem Colo.	Largura (mm) do Central.
T2				
□		31,4	4,6	8,8
T3				
□		33,9	4,6	8,3
T5				
□		33,2	4,9	8,2
T6				
□		34,5	5,3	9,4
T7				
□		33,2	4,9	8,0
T9				
□		38,1	5,4	9,2
T10				
□		39,5	5,9	11,9
T12				
□		39,5	6,1	9,5

Posteriores Superiores e Inferiores Upper and Lower Posteriors

S2		28,8	31,3	S4		30,0	33,4
S3		29,8	33,1	S5		33,5	35,3

* Medida (mm) correspondente ao Espaço dos Posteriores Superiores do 1º ao 2º Molar em Linha.
 ** Medida (mm) correspondente ao Espaço dos Posteriores Inferiores do 1º ao 2º Molar em Linha.

DENTES DE POLÍMERO SINTÉTICO PARA PRÓTESES DENTÁRIAS

Dentes TRISUPER são fabricados com Polímero de Metilmetacrilato de alto peso molecular (Resina Acrílica), cross-linked e Fluorescentes.

Para melhor adesão dos dentes ao polímero da base da prótese, tirar o brilho do dente com uma ferramenta abrasiva. Após isolamento da mufra e antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes com monômero de metilmetacrilato.

Embalagem: 8 placas anteriores e 5 placas posteriores.
 Armazenagem: Conservar ao abrigo de luz e calor.

Tabela de Articulação Trisuper Articulation Chart

	ANTERIOR	POSTERIOR
R 1	T 3 - T 5	S 2
R 2	T 5 - T 6	S 4
R 3	T 6	S 4
R 4	T 9	S 5
R 5	T 10	S 5
V 3	T 2 - T 5	S 3
V 4	T 9 - T 10	S 5
A 2	T 6 - T 7	S 2
A 3	T 6	S 4
Z 1	T 7	S 2
Z 3	T 3	S 3
Z 4	T 3 - T 5	S 4
C 1	T 7	S 2
C 2	T 5	S 3
X 1	T 9	S 4
X 2	T 12	S 4
X 4	T 12	S 5

Correlação de Formas entre Trilux e Trisuper

	ANTERIOR	POSTERIOR
E 1	K 3 - K 5	M 2
E 2	K 5 - K 6	M 4
E 3	K 6	M 4
E 4	K 9	M 5
E 5	K 10	M 5
F 3	K 2 - K 5	M 3
F 4	K 9 - K 10	M 5
G 2	K 6 - K 7	M 2
G 3	K 6	M 4
H 1	K 7	M 2
H 3	K 3	M 3
H 4	K 3 - K 5	M 4
I 1	K 7	M 2
I 2	K 5	M 3
L 1	K 9	M 4
L 2	K 6 - K 12	M 4
L 4	K 12	M 5

Tabela de Cores / Shade Guide / Guia de Cores

Escala Trisuper	1A	1C	1D	1E	2A	2B	2C	3A	3E	4B
-----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----